


Blutentnahme

Gerinnung

Citrat-Tube, hellblau (4)

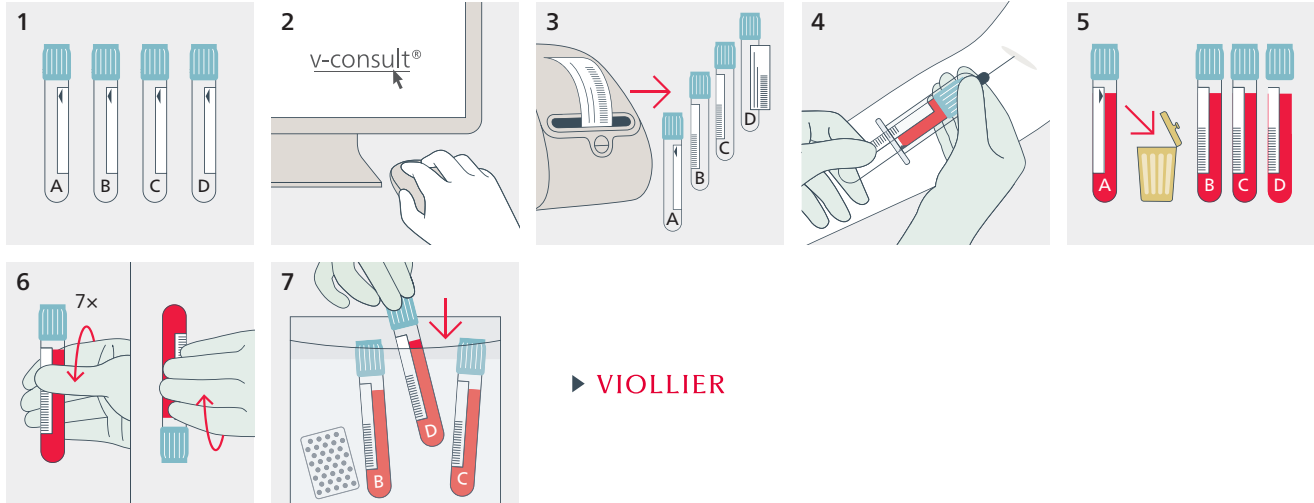

- 4 Vene möglichst wenig stauen oder nach Punktion Stauung sofort lösen. Vene nicht beklopfen
- 5 Erstes Tube (A) verwerfen.
Tube jeweils vollständig bis zur Marke füllen (Mischverhältnis Blut:Citrat)
- 7 **Tubes un zentrifugiert sofort per Kurier transportieren.**
Spezielle Gerinnungsabklärungen: Telefonische Anmeldung und Absprache des Transportzeitpunkts