



Accessori

- Apparecchio con cavo, carta chip e batterie inserite
- Custodia igienica con cinghia regolabile
- Elettrodi autoadesivi
- Formulario di richiesta, diario del paziente e istruzioni
- Legaccio per la rispedizione

Rispedizione

A registrazione terminata voglia rispeditare l'apparecchio **con cavi inseriti**, cinghia, custodia igienica, formulario di richiesta e diario del paziente.

- tramite Servizio clientela
- per posta

Per la rispedizione della valigetta voglia:

- Estrarre l'etichetta dal campo visivo e girarla
→ **compare l'indirizzo Viollier AG**
- Reinserrire l'etichetta nel campo visivo
- Chiudere la valigetta con l'allegato legaccio
- Affrancatura a carico di Viollier



STS 0292



IS TRUZIONI

ECG delle 24h

Informazioni importanti

Avviare solo dopo montaggio al paziente. Non effettuare misurazioni di prova → l'apparecchio non può essere avviato una seconda volta.

- L'apparecchio funziona anche se la luce blu lampeggiante si spegne. La luce blu non ha nessun importanza per la registrazione
- Una pressione sul bottone giallo durante la registrazione genera un segnale acustico e non causa alcun cambiamento della registrazione.
- Se, durante la registrazione, la carta chip fuoriuscisse dall'apparecchio suona un bip → In tal caso reinserire la carta chip.
- Spegnere l'apparecchio prima di staccare gli elettrodi.
- Lasciare le batterie nel registratore, non rimuoverle.
- Telefoni cellulari e forti fonti elettromagnetiche possono influenzare la qualità della registrazione.

The top form is a patient protocol for cardiology, detailing various tests and procedures. The bottom form is a patient diary grid with columns for date, time, and notes, used for recording symptoms and activities during the recording period.

Diario del paziente

Informi il paziente sull'importanza diagnostica di compilare correttamente ed esaurientemente il diario del paziente.

Annotare l'inizio e la fine della registrazione con data e ora.

Indicare la data e l'ora di disturbi, attività straordinarie, assunzione di farmaci e fasi di sonno.





Identificazione e analisi

- Generalità del paziente
- La data da Lei riportata e l'esatta ora d'inizio della registrazione
- Il numero d'apparecchio e di chip indicato da Viollier nel formulario di richiesta

No. apparecchio	010	No. sensore nasale	
No. chip	052	No. sensore ditale	

Voglia utilizzare esclusivamente l'allegato formulario di richiesta già provvisto del Suo indirizzo.

Applicazione dell'apparecchio

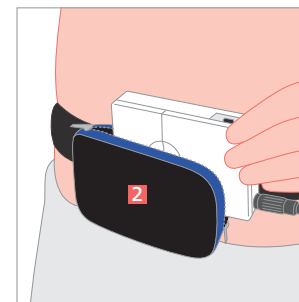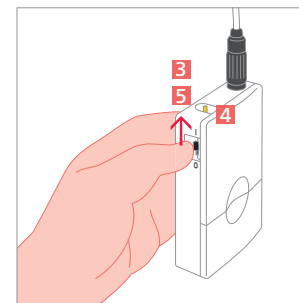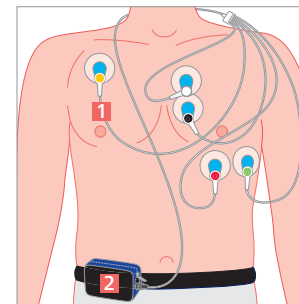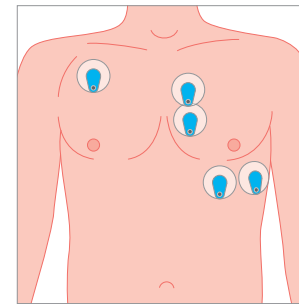

Montaggio dell'apparecchio

- Sgrassare la pelle con alcol 70% e radere i peli per garantire la perfetta aderenza degli elettrodi.
- Posizionare gli elettrodi autoadesivi come da illustrazione.
- Collegare i cavi secondo i rispettivi colori come da illustrazione:
 - giallo
 - bianco
 - nero
 - rosso
 - verde
- Far passare il cavo intorno alla nuca e condurlo verso il basso lungo il lato destro del corpo → Non fissare il cavo e il manico con adesivi 1.
- Indossare l'apparecchio 2 nella custodia igienica con la cinghia intorno all'addome.

Avviare l'apparecchio

- Spostare sulla posizione I l'interruttore nero 3 a levetta → non spegnere più l'apparecchio.
- Avviare la registrazione: premere per 10 secondi il tasto giallo 4 fino a che l'avvio venga confermato da 3 bip.
- Dopo 24 ore spegnere (posizione 0) 5, smontare e rispedito l'apparecchio.

This is a comprehensive medical form for cardiology and pneumology. It includes sections for patient identification, symptoms, medical history, and specific diagnostic tests. The form is designed to be filled out by a healthcare professional to provide a detailed clinical picture of the patient.