



MODE D'EMPLOI



ECG de 24h



VIOLLIER

Informations importantes

N'insérer l'accu que lorsque l'appareil est déjà mis en place sur le patient. L'enregistrement commence dès lors que l'appareil et l'accu sont connectés.

- Après l'enregistrement, renvoyer l'appareil avec l'accu encore inséré.
- Convient aux patients à partir de 10 kg.
- Ne pas utiliser l'appareil à proximité d'un CT, d'un IRM ou d'une source de rayons X.
- Les téléphones portables, les sources électromagnétiques puissantes et les couvertures chauffantes électriques peuvent influencer la qualité de l'enregistrement.

Patientenprotokoll Kardiologie
Carnet du patient Cardiologie
Diario del paziente Cardiologia

Hersteller: VIOLLIER

Table with 3 columns: Date, Uhrzeit, and a large empty area for recording symptoms and observations.

Carnet du patient

Veillez attirer l'attention du patient sur l'importance diagnostique d'un carnet de patient entièrement et correctement rempli.

Noter le début et la fin de l'enregistrement en précisant la date et l'heure.

Inscrire la date et l'heure des symptômes, des activités inhabituelles, de la prise de médicaments et des phases de sommeil.

Cardiologie - Pneumologie

Hersteller: VIOLLIER

Form containing patient information fields (Nom, Prénom, Adresse) and a large section of checkboxes for recording symptoms and medical history.

Identification et analyse

- Coordonnées du patient
- Date et heure exacte du début de l'enregistrement notées par vos soins
- Numéro de l'appareil, du chip et de l'accu inscrits par Viollier sur le formulaire de demande d'analyses.

N° de l'appareil	006	N° du brassard	
N° du chip	659	N° de l'accu	010



Veillez utiliser uniquement le formulaire de demande d'analyses joint, sur lequel figure déjà votre adresse.

Mise en place de l'appareil




Pose de l'appareil

- Dégraisser la peau avec de l'alcool à 70 % et raser les poils afin que les électrodes adhèrent de façon optimale à la peau.
- Emboîter fermement l'appareil et l'accu, un clic est alors audible.
- Sous la touche Event **1**, apparaît un court instant une **lumière verte** clignotant rapidement **2**, puis une **lumière rouge** **3** et ensuite une **lumière verte** clignotant lentement **2**. L'appareil est prêt pour l'enregistrement.
- Passer le câble vert par le petit trou sous l'étui de protection **4** puis y glisser l'appareil.
- En respectant le code couleur, relier les câbles comme indiqué sur l'illustration.
- Placer les électrodes autoadhésives comme indiqué sur l'illustration.
- Passer la sangle nucale et l'appareil par-dessus la tête → la **touche Event gris foncé 5** doit être orientée vers l'avant.
- Brancher les câbles avec les couleurs correspondantes :
 - rouge ● vert ● jaune

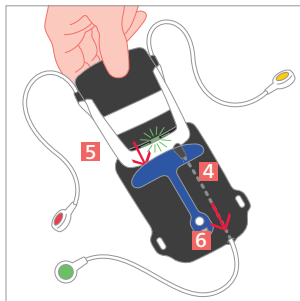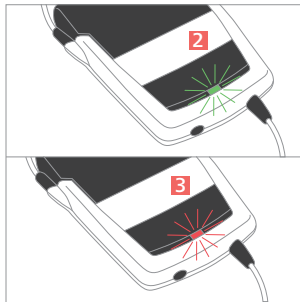

Enregistrement

Le patient peut marquer lui-même un enregistrement. Lors de symptômes, l'enregistrement peut être déclenché en appuyant sur le point blanc **6**. Si aucun symptôme n'est perceptible, l'ECG est en mesure de reconnaître les troubles du rythme et de les enregistrer.

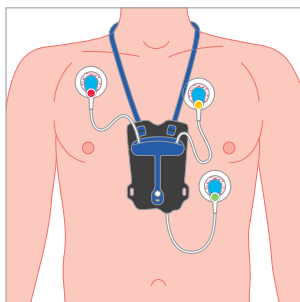

Contrôle du mode d'enregistrement

Lumière verte : l'enregistrement est en cours

Lumière rouge : l'enregistrement est terminé; enlever l'appareil et le renvoyer.

L'enregistrement se termine automatiquement au bout de 24 heures.



Accessoires

- Appareil avec 3 câbles et chip inséré
- Accu
- Etui de protection avec sangle nucale réglable
- Electrodes autoadhésives
- Formulaire de demande d'analyses, carnet du patient et mode d'emploi
- Sangle de fermeture pour le renvoi


Renvoi

Une fois l'enregistrement terminé, veuillez nous renvoyer l'appareil, **sans avoir débranché l'accu**, le chip, la sangle, l'étui de protection ainsi que le formulaire de demande d'analyses et le carnet du patient

- via le Service clientèle
- via la poste

Pour le renvoi du coffret, veuillez :

- Retirer l'étiquette de la fenêtre transparente et la retourner → **adresse Viollier AG est visible**
- Insérer à nouveau l'étiquette dans la fenêtre transparente
- Fermer le coffret avec la sangle de fermeture jointe
- Viollier prend en charge les frais de port

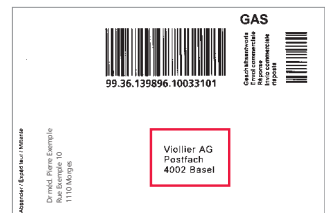

Herz-Lungen-Praxis Spalenring | Spalenring 147 | 4055 Basel

T +41 61 486 11 11 | viollier.ch | Lundi – Vendredi 07:30 – 18:00 h