



IS TRUZIONI



ECG delle 24h



VIOLLIER

Informazioni importanti

Avviare solo dopo montaggio al paziente. Non effettuare misurazioni di prova → l'apparecchio non può essere avviato una seconda volta.

- L'apparecchio funziona anche se la luce blu lampeggiante si spegne. La luce blu non ha nessun importanza per la registrazione
- Una pressione sul bottone giallo durante la registrazione genera un segnale acustico e non causa alcun cambiamento della registrazione.
- Se, durante la registrazione, la carta chip fuoriuscisse dall'apparecchio suona un bip → In tal caso reinserire la carta chip.
- Spegnere l'apparecchio prima di staccare gli elettrodi.
- Lasciare le batterie nel registratore, non rimuoverle.
- Telefoni cellulari e forti fonti elettromagnetiche possono influenzare la qualità della registrazione.

Patientenprotokoll Kardiologie
Carnet du patient Cardiologie
Diario del paziente Cardiology

Diario del paziente

Informi il paziente sull'importanza diagnostica di compilare correttamente e completamente il diario del paziente.

Si prega di utilizzare una penna a sfera nera, non una matita.

Annotare l'inizio e la fine della registrazione con data e ora.

Indicare la data e l'ora di disturbi, attività straordinarie, assunzione di farmaci e fasi di sonno.

Cardiologia - Pneumologia
Spedimento 147/4050 Base
T +41 61 486 12 80 | F +41 61 486 12 18
Integrazioni/Integrations

022
012

Farmaci
+ Farmaci convenzionali (vedi pag. 40)
+ Farmaci
+ Diagnostici / Praxigrel
+ Betas
+ Inibitori ACE
+ Antagonisti dei recettori AT II
+ Beta-bloccanti
+ Antagonisti del calcio
+ Diuretici
+ Digossina
+ Calcioantagonisti
+ Digitali
+ Anticoagulanti / Antitrombotici


Identificazione e analisi

- Generalità del paziente
- La data da Lei riportata e l'esatta ora d'inizio della registrazione
- Il numero d'apparecchio e di chip indicato da Viollier nel formulario di richiesta

No. apparecchio	022
No. chip	012

Voglia utilizzare esclusivamente l'allegato formulario di richiesta già provvisto del suo indirizzo.

Applicazione dell'apparecchio

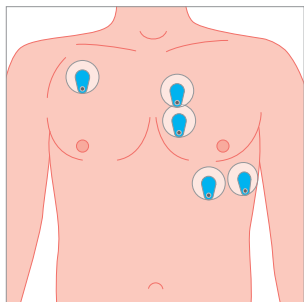

Montaggio dell'apparecchio

- Sgrassare la pelle con alcol 70% e radere i peli per garantire la perfetta aderenza degli elettrodi.
- Posizionare gli elettrodi autoadesivi come da illustrazione.

- Collegare i cavi secondo i rispettivi colori come da illustrazione:

● giallo


○ bianco

● nero

● rosso



● verde

- Far passare il cavo intorno alla nuca e condurlo verso il basso lungo il lato destro del corpo → **non fissare il cavo e il manico con adesivi 1.**
- Indossare l'**apparecchio 2** nella custodia igienica con la cinghia intorno all'addome.

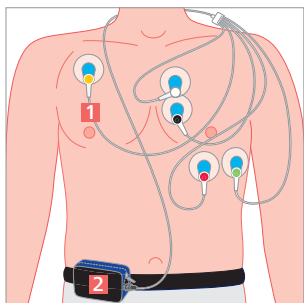

Avviare l'apparecchio

- Spostare sulla posizione I l'**interruttore nero 3** → **non spegnere più l'apparecchio.**
- Avviare la registrazione: **premere per 10 secondi il tasto giallo 4** fino a che l'avvio venga confermato da 3 bip.
- Dopo 24 ore spegnere (posizione 0) **5**, smontare e rispedire l'apparecchio.

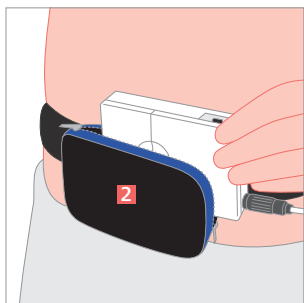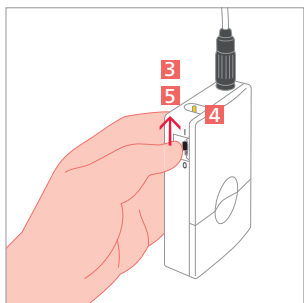



Accessori

- Apparecchio con cavo, carta chip e batterie inserite
- Custodia igienica con cinghia regolabile
- Elettrodi autoadesivi
- Formulario di richiesta, diario del paziente e istruzioni
- Clip di chiusura rosso per la rispedizione

Rispedizione

A registrazione terminata voglia rispeditare l'apparecchio **con cavi inseriti**, cinghia, custodia igienica, formulario di richiesta e diario del paziente.

- tramite Servizio clientela
- per posta

Per la rispedizione della valigetta voglia:

- Estrarre l'etichetta dal campo visivo e girarla
→ **compare l'indirizzo Viollier AG**
- Reinserrire l'etichetta nel campo visivo
- Chiudere la valigetta con il clip di chiusura rosso
- Affrancatura a carico di Viollier

