

#### Zubehör

- Gerät mit 4 Kabeln
- Selbstklebeelektroden
- Auftragsformular, Patiententagebuch und Anleitung
- Roter Verschlussclip für die Rücksendung

#### Rücksendung

Bitte senden Sie uns nach Beendigung der Aufnahme das Gerät, Auftragsformular und Patiententagebuch zurück. Die Versandkosten übernimmt Viollier.


- Per Kundendienst – Abgabe in der Praxis
- Per DPD – Abgabe an einem Pickup parcelshop → [dpgroup.com/ch/mydpd/parcel-shops](https://dpgroup.com/ch/mydpd/parcel-shops)
- Per Post

Bitte beachten Sie für die Rücksendung des Koffers:

- Etiketle aus Sichtfeld entfernen
- Entsprechende Retourenetikette (im Koffer) in das Sichtfeld schieben  
→ Adresse Viollier AG wird sichtbar
- Koffer mit rotem Verschlussclip schliessen

**Herz-Lungen-Praxis** | Spalenring 147 | 4055 Basel | T +41 848 121 121 | [viollier.ch](https://viollier.ch)  
Montag – Freitag 07:30 – 18:00 h

© by Viollier AG / 12.2025 / 18590

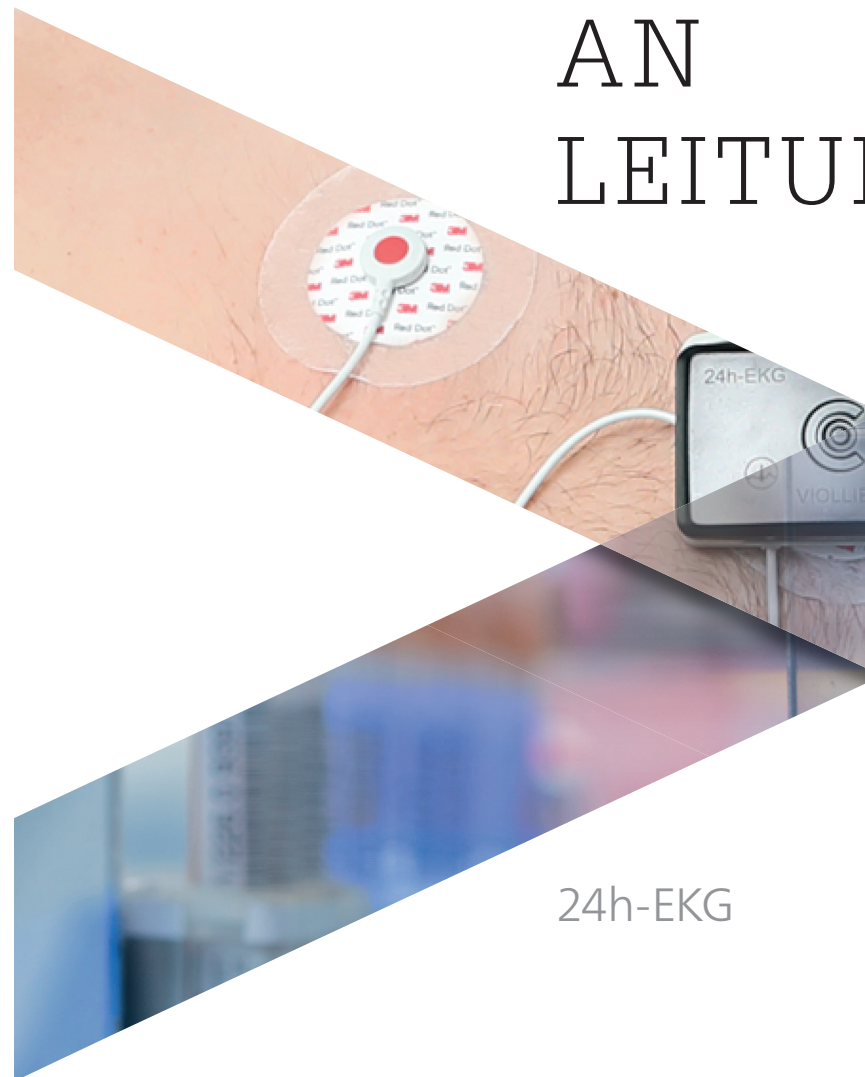

24h-EKG



## Wichtige Informationen

Die Aufnahme beginnt innerhalb von 60 Sekunden, nachdem die Elektroden Hautkontakt haben.

- Geeignet für Patienten ab 10 kg
- Gerät nicht in der Nähe von CT, MRI und Röntgen einsetzen.
- Mobiltelefone, starke elektromagnetische Quellen und elektrische Heizdecken können die Qualität der Aufzeichnung beeinflussen.
- Das Tragen im Schwimmbad, in der Sauna, Badewanne, Dusche oder ähnlichen Feuchträumen ist verboten.

[illegible]

# Patiententagebuch

Bitte informieren Sie den Patienten über die diagnostische Wichtigkeit, das Patiententagebuch korrekt und vollständig auszufüllen.

- Bitte einen schwarzen Kugelschreiber verwenden.
- Start und Ende der Registrierung mit Datum und Zeit notieren.
- Datum und Zeit von Beschwerden, aussergewöhnlichen Aktivitäten, Medikamenten und Schlafphasen eintragen.

[illegible]

## Identifikation und Analyse

- Personalien des Patienten
- Das von Ihnen eingetragene Datum und die genaue Startzeit der Aufnahme
- Die von Viollier eingetragene Geräte-  
nummer auf dem Auftragsformular


Geräte-Nr.	006	Manschetten-Nr.	
Chip-Nr.		Akku-Nr.	

Bitte benutzen Sie ausschliesslich das beigelegte Auftragsformular, das bereits mit Ihrer Adresse versehen ist.

## Anlegen des Gerätes


## Vorbereitung

- Haut mit Ethanol 70% entfetten und Haare rasieren, damit die Elektroden optimal kleben.
- Bringen Sie die Elektroden an den Kabelenden an.
- Bringen Sie eine zusätzliche (beliebige) Einmal-Klebeelektrode am Druckknopf-Kontakt auf der Rückseite des Gerätes an. Diese Elektrode dient zur Fixierung des Gerätes an der Brust des Patienten. Bewegungsartefakte werden dadurch reduziert und die Qualität der Aufzeichnung verbessert. Diese Elektrode hat keine medizinische / diagnostische Funktion.

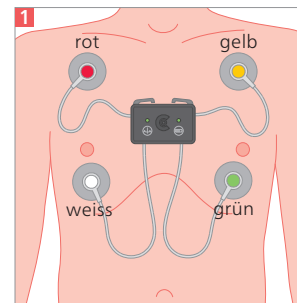

## Gerät montieren

- Selbstklebeelektroden gemäss Abbildung 1 am Brustkorb des Patienten positionieren:  
 ● rot ● gelb ● grün ○ weiss
- Die Elektrode zur Fixierung fest am Rand an die Haut drücken.
- Das Gerät startet selbständig innerhalb von 60 Sekunden, nachdem die Elektroden Hautkontakt haben.

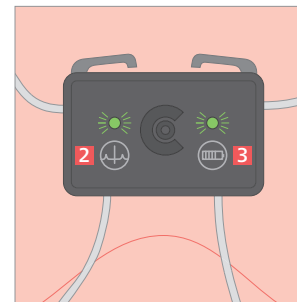

## Aufzeichnungsmodus kontrollieren

- Das Symbol 'QRS-Komplex' **2** zeigt den Aufzeichnungsstatus an.  
**Grün blinkendes Licht:** EKG-Aufzeichnung aktiv
- Das Symbol 'Batterie' **3** gibt Auskunft zum Ladestatus.  
**Grün blinkendes Licht:** Akkuspannung ausreichend

Durch kräftiges Klopfen mit der flachen Hand auf das Gerät kann der Patient / die Patientin bei Beschwerden einen Marker setzen.