

Accessoires

- Appareil avec 4 câbles
- Electrodes autoadhésives
- Formulaire de demande d'analyses, carnet du patient et mode d'emploi
- Clip de fermeture rouge pour le renvoi

Renvoi

Une fois l'enregistrement terminé, veuillez nous renvoyer l'appareil, le formulaire de demande d'analyses et le carnet du patient. Viollier prend en charge les frais de port.


- Via le Service clientèle – remettre au cabinet
- Via DPD – déposer dans un Pickup parcelshop → dpgroup.com/ch/mydpd/parcel-shops
- Via la poste

Pour le renvoi du coffret, veuillez :

- Retirer l'étiquette de la fenêtre transparente
- Glisser l'étiquette de retour correspondante (à l'intérieur du coffret) dans la fenêtre transparente
→ l'adresse Viollier AG est visible
- Fermer le coffret avec le clip de fermeture rouge

Herz-Lungen-Praxis | Spalenring 147 | 4055 Basel | T +41 848 121 121 | viollier.ch
Lundi – vendredi 07:30 – 18:00 h

© by Viollier AG / 12.2025 / 18591

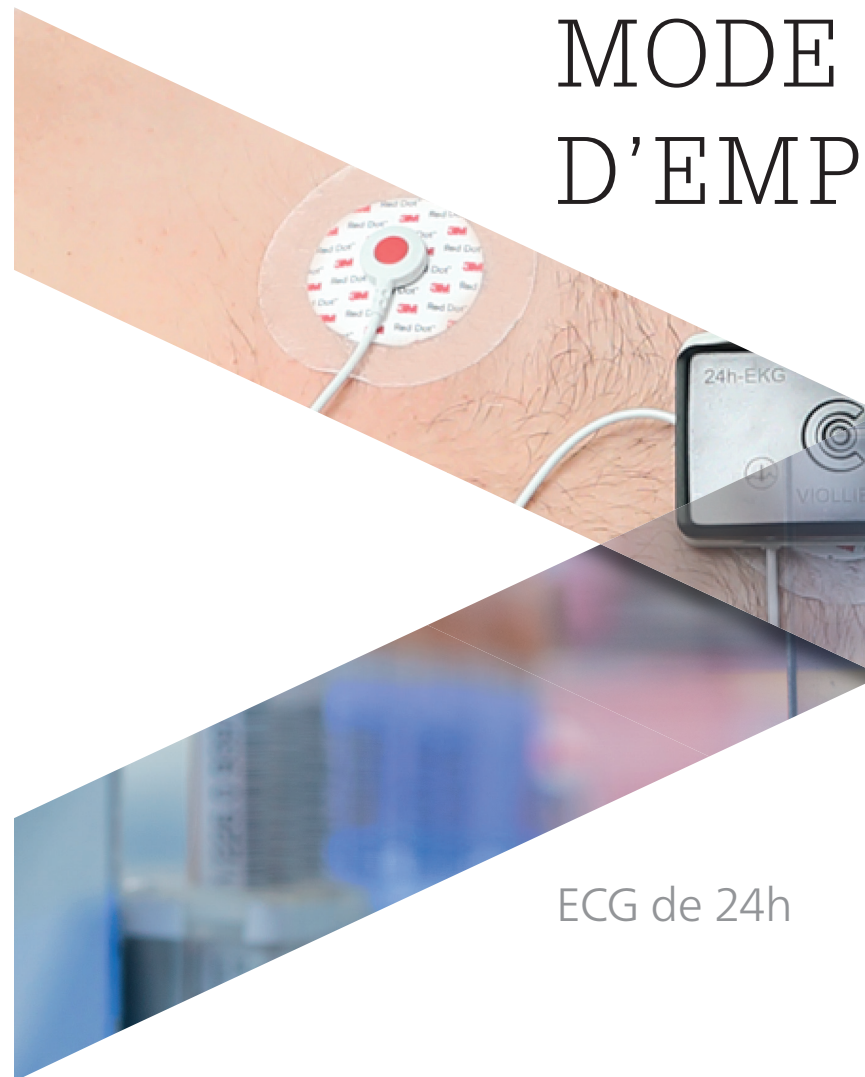

ECG de 24h



Informations importantes

L'enregistrement commence dans les 60 secondes qui suivent le contact des électrodes avec la peau.

- Convient aux patients à partir de 10 kg
- Ne pas utiliser l'appareil à proximité d'un CT, d'un IRM ou d'une source de rayons X.
- Les téléphones portables, les sources électromagnétiques puissantes et les couvertures chauffantes électriques peuvent influencer la qualité de l'enregistrement.
- Il est interdit de porter l'appareil dans une piscine, un sauna, une baignoire, une douche ou toute autre pièce humide similaire.

[illegible]

Carnet du patient

Veuillez attirer l'attention du patient sur l'importance diagnostique d'un carnet de patient entièrement et correctement rempli.

- Veuillez utiliser un stylo à bille noir.
- Noter le début et la fin de l'enregistrement en précisant la date et l'heure.
- Inscrire la date et l'heure des symptômes, des activités inhabituelles, de la prise de médicaments et des phases de sommeil.

[illegible]

Identification et analyse

- Coordonnées du patient
- Date et heure exacte du début de l'enregistrement notées par vos soins
- Numéro de l'appareil inscrit par Viollier sur le formulaire de demande d'analyses


N° de l'appareil	006	N° du brassard			
N° du chip		N° de l'accu			

Veuillez utiliser uniquement le formulaire de demande d'analyses joint, sur lequel figure déjà votre adresse.

Mise en place de l'appareil


Préparation

- Dégraisser la peau avec de l'alcool à 70 % et raser les poils afin que les électrodes adhèrent de façon optimale à la peau.
- Fixez les électrodes aux extrémités des câbles.
- Appliquer une électrode adhésive supplémentaire (de n'importe quel type) à usage unique sur le bouton-pression situé à l'arrière de l'appareil. Cette électrode sert à fixer l'appareil sur la poitrine du patient. Les artefacts de mouvement sont ainsi réduits et la qualité de l'enregistrement est améliorée. Cette électrode n'a aucune fonction médicale / diagnostique.

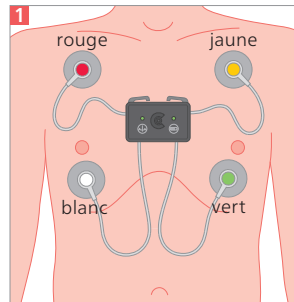



Pose de l'appareil

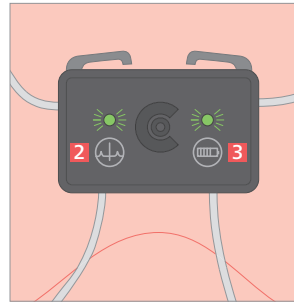- Positionner les électrodes autocollantes sur le thorax du patient conformément à l'illustration **1** :
 ● rouge ● jaune ● vert ○ blanc
- Appuyer fermement le bord de l'électrode contre la peau afin de la fixer.
- L'appareil démarre automatiquement dans les 60 secondes qui suivent le contact des électrodes avec la peau.



Contrôle du mode d'enregistrement

- L'icône 'Complexe QRS'  indique l'état de l'enregistrement.
- Le symbole 'Batterie'  donne des informations sur l'état de charge.

En tapotant fortement sur l'appareil avec le plat de la main, le / la patient(e) peut déclencher un marquage en cas de symptômes.