

Accessori

- Apparecchio con 4 cavi
- Elettrodi autoadesivi
- Formulario di richiesta, diario del paziente e istruzioni
- Clip di chiusura rossa per la rispedizione

Rispedizione

A termine della registrazione la preghiamo di volerci rispedire apparecchio, formulario di richiesta e diario del paziente. Le spese di spedizione sono a carico di Viollier.

- Tramite Servizio clientela – consegna allo studio medico
- Tramite DPD – consegna presso un Pickup parcelshop → dpgroup.com/ch/mydpd/parcel-shops
- Per posta

Per la rispedizione della valigetta voglia:

- Rimuovere l'etichetta dal campo visivo
- Far scorrere l'etichetta di reso corrispondente (nella custodia) nel campo visivo
→ [l'indirizzo Viollier AG compare](#)
- Chiudere la valigetta con clip di chiusura rossa

Herz-Lungen-Praxis | Spalenring 147 | 4055 Basel | T +41 848 121 121 | viollier.ch
Lunedì – venerdì 07:30 – 18:00 h

© by Viollier AG / 12.2025 / 18592



ECG delle 24h



Informazioni importanti

La registrazione inizia entro 60 secondi dal contatto degli elettrodi con la pelle.

- Adatto per pazienti a partire da 10 kg
- Non utilizzare l'apparecchio vicino a TAC, MRI e apparecchiature radiologiche.
- Telefoni cellulari, forti fonti elettromagnetiche e termocoperte elettriche possono influenzare la qualità della registrazione.
- È vietato indossare l'apparecchio in piscina, sauna, vasca da bagno, doccia o in altri ambienti umidi.

[illegible]

Cardiologia – Pneumologia

Sottosettore 142 / 4035 BaseI
+41 485 122 121
cardiologia@univ.ch

VIOLLIER

Cognome					
Nome					
VIA / no.					
N/A / Lavoro					

441					
442					
443					
444					
445					
446					
447					
448					
449					
450					

Origine					
Rappresento per sé					
Rappresento per lui					
Rappresento per lei					
Rappresento per loro					

Dr. med. Pietro Esposito
Via Luna 10
6900 Lugano

Pensione / Carta malati					
Completato					
ABB					
Sesso					
Assicurazione / No assicurazione					
Debitore					
Prestazione / No prestazione					
Pre indenne					
Pre indenne					

Cognome / Indirizzo					
Cognome / Indirizzo					
Cognome / Indirizzo					
Cognome / Indirizzo					
Cognome / Indirizzo					

4866 (per uso privato) e 0066 (per uso pubblico) sono adatti a distinguere per ogni numero individuale. Fornitore medico

No. apparenza	No. malattia	No. versione attuale
0066		
No. chip	No. batteria	

Consulso per i seguenti esami
In quale unità medica regione di Basilea

Cardiologia

- ☐ Misurazione dell'ASI
- ☐ Risonanza magnetica
- ☐ Infusione di ferro
- ☐ Spettrometria
- ☐ Controllo pace-maker / CRT o ICD
- ☐ ECG a riposo
- ☐ Elettrocardiografia da sforzo
- ☐ Elettrofisiologia
- ☐ Diagnostica d'urto
- ☐ Spontaneità

Pneumologia

- ☐ Accoppiamento altoparlanti
- ☐ Pirotecnica al corpo
- ☐ Risonanza magnetica con metallosi
- ☐ NPS prima allungamento, controllo succursivo
- ☐ TAP prima allungamento, controllo succursivo
- ☐ Irradiazione O2 e protezione con gasmetria
- ☐ Risonanza per i sintomi di fusione
- ☐ Spontaneità
- ☐ Non con autorizzazione di 6 mesi / emergenza con gasmetria

Diagnosi:

Consulso con apparecchi diagnostici
cardiologici e pneumologici

Prestazioni in tutta la Svizzera

- ☐ Tutti importanti
- ☐ Apparecchio applicato al data
- ☐ Con frangia
- ☐ ECG della 24h
- ☐ Multispettro della 24h
- ☐ ECG 12 giorni
- ☐ Spontaneità
- ☐ Pulsoimetro (intermittente)
- ☐ Diagnostica di apparecchi presso la filiale

Sintomi:

Farmac

- ☐ No. versione corrente
- ☐ Aspirina
- ☐ Digossina
- ☐ Digossina / Digossina
- ☐ Aspirinaglioli cili
- ☐ Inibitori ACE
- ☐ Antagonisti dei recettori AT II
- ☐ Integratori del calcio
- ☐ Nitroglicerina
- ☐ Beta-bloccanti
- ☐ Statine
- ☐ Diuretici
- ☐ Inibitori SGLT2
- ☐ Anticoagulanti
- ☐ Digossina
- ☐ Spontaneità / Inibizione

Diario del paziente

Si prega di informare il paziente sull'importanza diagnostica di compilare correttamente e completamente il diario del paziente.

- Si prega di utilizzare una penna a sfera nera.
- Annotare l'inizio e la fine della registrazione con data e ora.
- Indicare la data e l'ora di disturbi, attività straordinarie, assunzione di farmaci e fasi del sonno.

Identificazione e analisi

- Generalità del paziente
- La data e l'ora esatta d'inizio della registrazione da lei riportate
- Il numero d'apparecchio indicato da Viollier nel formulario di richiesta



No. apparecchio	006	No. manicotto			
No. chip		No. batteria			

Voglia utilizzare esclusivamente l'allegato
formulario di richiesta già provvisto del suo
indirizzo.

Applicazione dell'apparecchio

Preparazione

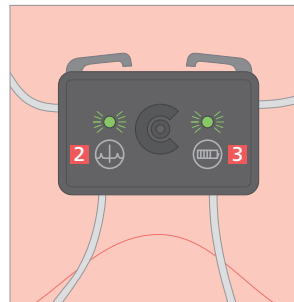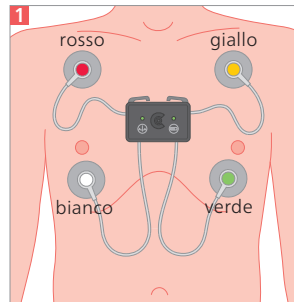

- Sgrassare la pelle con etanolo 70% e rasare i peli per garantire la perfetta aderenza degli elettrodi.
- Collegare gli elettrodi alle estremità del cavo.
- Collegare un elettrodo adesivo monouso aggiuntivo (qualsiasi) al contatto del bottone a pressione sul retro del dispositivo. Questo elettrodo viene utilizzato per fissare l'apparecchio al torace del paziente. Questo riduce gli artefatti da movimento e migliora la qualità della registrazione. Questo elettrodo non ha alcuna funzione medica / diagnostica.



Applicare l'apparecchio

- Posizionare gli elettrodi autoadesivi come da illustrazione **1** al torace del paziente:
● rosso ● giallo ● verde ○ bianco
- Premere con forza il bordo dell'elettrodo contro la pelle per fissarlo.
- L'apparecchio si avvia automaticamente entro 60 secondi dal contatto degli elettrodi con la pelle.

Controllo della modalità di registrazione

- Il simbolo del 'complesso QRS'  indica lo stato di registrazione.
Luce verde lampeggiante: registrazione ECG attiva
- Il simbolo 'Batteria'  fornisce informazioni sullo stato di carica.
Luce verde lampeggiante: tensione della batteria sufficiente

Battendo con forza con il palmo della mano sull'apparecchio, il paziente può generare un segnale in caso di disagio