


Blutentnahme – Kälteagglutinine

Tube ohne Zusatz, rot (2)

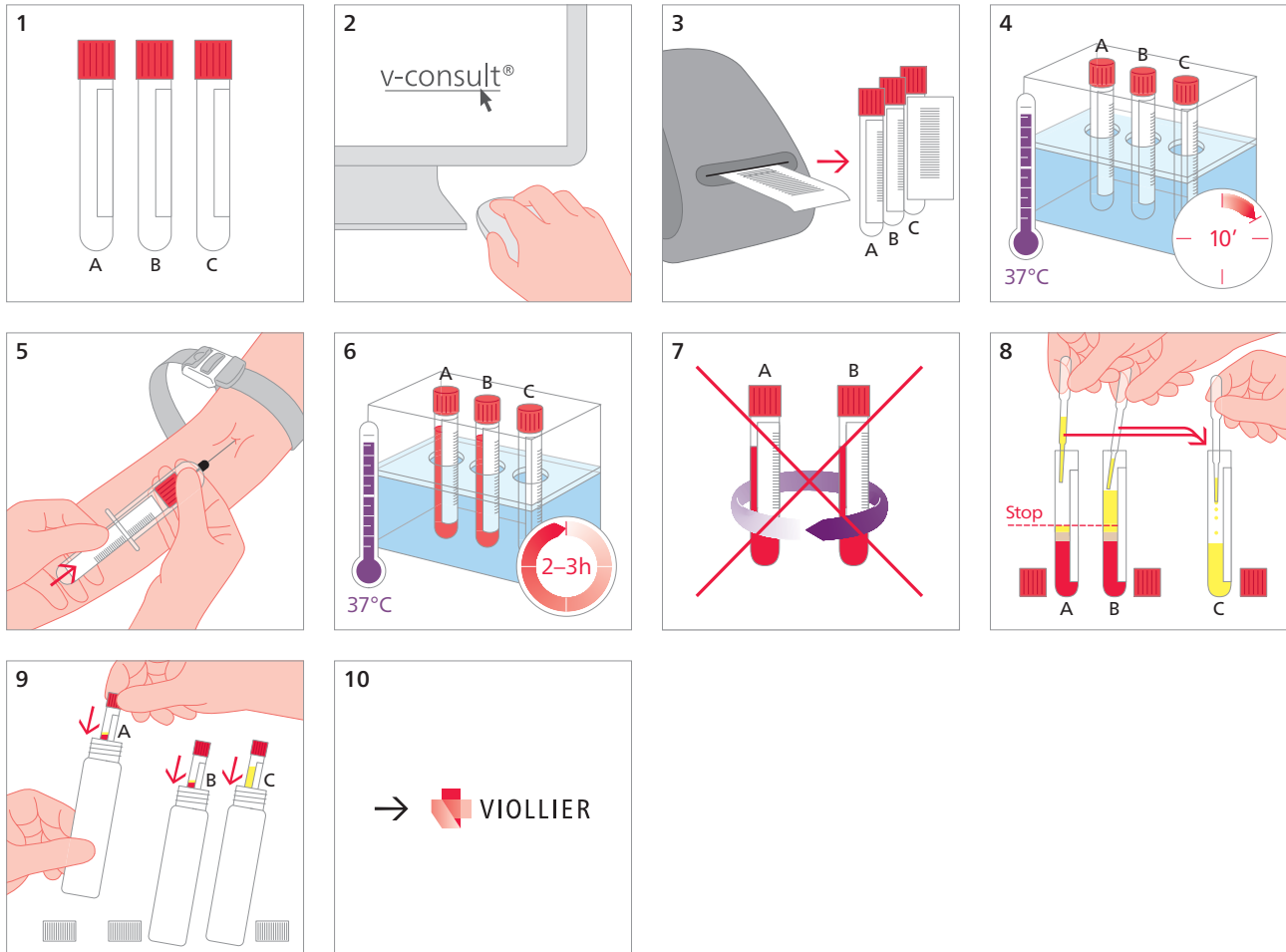

- Tubes 10 min bei 37°C vorwärmen
- Blutentnahme in 2 Tubes ohne Zusatz, rot
- Sedimentation während 2 – 3h bei 37°C, **nicht zentrifugieren**
- Serum in 3. Tube ohne Zusatz, rot transferieren
 - Ca. 4 mm Sicherheitsabstand vom Sediment
 - Vorsichtig pipettieren: Erythrozyten können das Resultat dieser Analyse verfälschen
- Falls diese Art der Präanalytik in der Praxis nicht garantiert ist, kann telefonisch die Blutentnahme bei Viollier vereinbart werden
- Blutentnahmezeiten: Montag – Donnerstag

Versandmaterial:

Bitte mit Namen, Vornamen und Geburtsdatum des Patienten beschriften