


## Abstrich – Genetischer Stammbaum

### Set Genetischer Stammbaum (47)

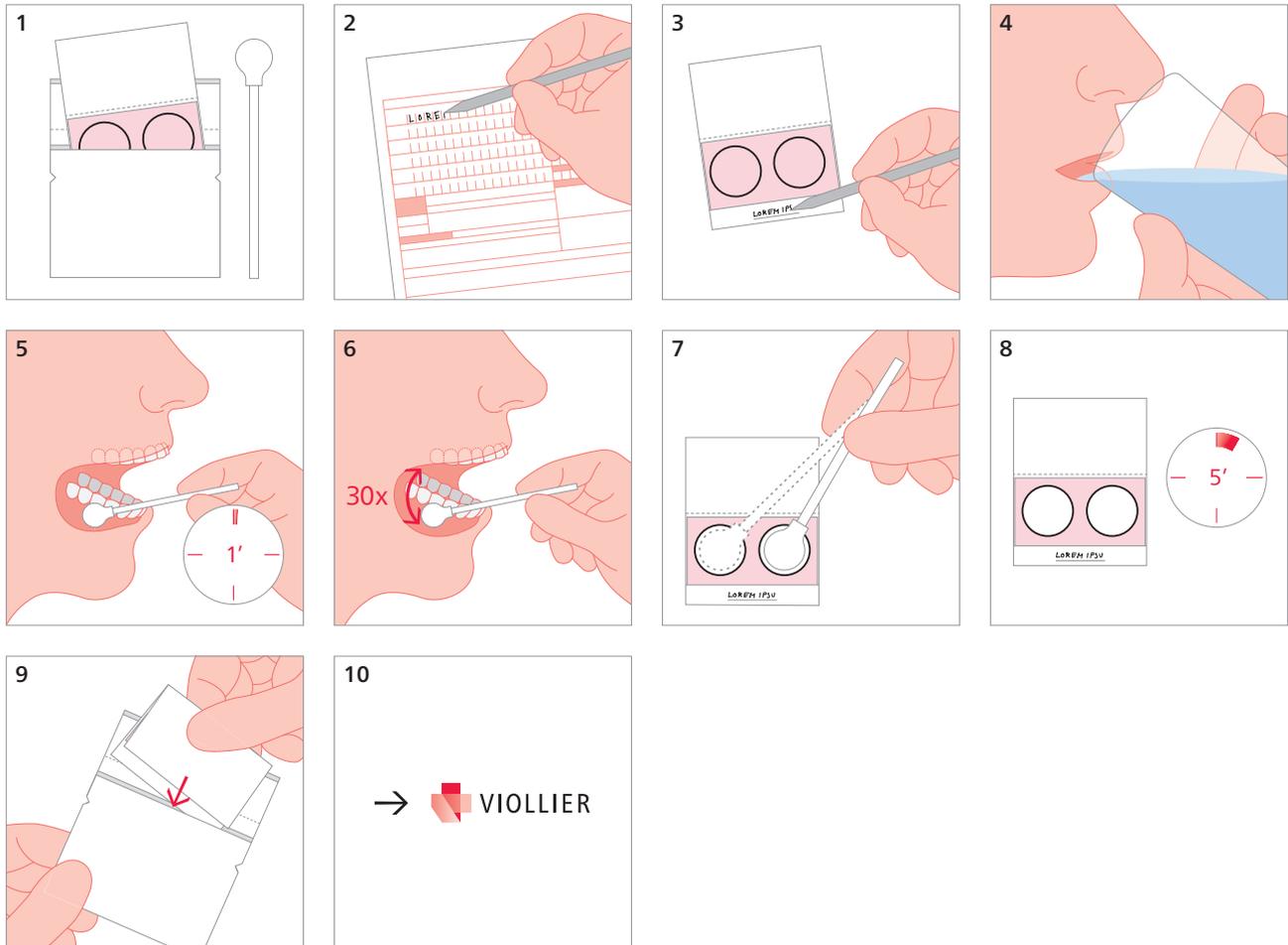

- 1 Kontaminationsgefahr mit fremder DNA:  
Bitte Wattestab und Entnahmepapier unbedingt steril handhaben

---

- 3 **Pro Person 1 Probenbriefchen**  
Probenbriefchen beschriften und öffnen

---

- 4 Unmittelbar vor der Entnahme den Mund mit Leitungswasser spülen

---

- 5 Das Schaumgummiende des Entnahmestabes zwischen Zahnhals und Wange positionieren  
und mit Speichel tränken, **1 min warten**

---

- 6 Danach mindestens **30 x kräftig** über die Wangeninnenfläche streichen

---

- 7 Mit dem speicheldurchtränkten Ende des Schaumgummis auf die rosa Flächen des Probenbriefchens  
stempeln, sodass diese durchnässt werden und sich weiss verfärben

---

- 8 Das Probenbriefchen 5 min an der Luft trocknen, danach in den Kunststoffbeutel zum  
Versand verpacken

---

Gemäss Verordnung über die Erstellung von DNA-Profilen im Zivil- und Verwaltungsbereich vom 14.02.2007 (VDZV; SR810.122.2) Artikel 12, Absatz 3 ist die zu untersuchende Person bei der Probenentnahme zu fotografieren. Das Foto ist von der Person oder ihrem gesetzlichen Vertreter zu unterschreiben.

Bitte legen Sie diese Fotos dem Auftrag bei, um die Bearbeitung des Auftrags zu gewährleisten.

Versandmaterial:

Bitte mit Namen, Vornamen und Geburtsdatum des Patienten beschriften