


Striscio – Citologia ginecologica: PCR ricerca di patogeni: ThinPrep®

ThinPrep® Pap Test™, strumenti diversi per la raccolta dei campioni

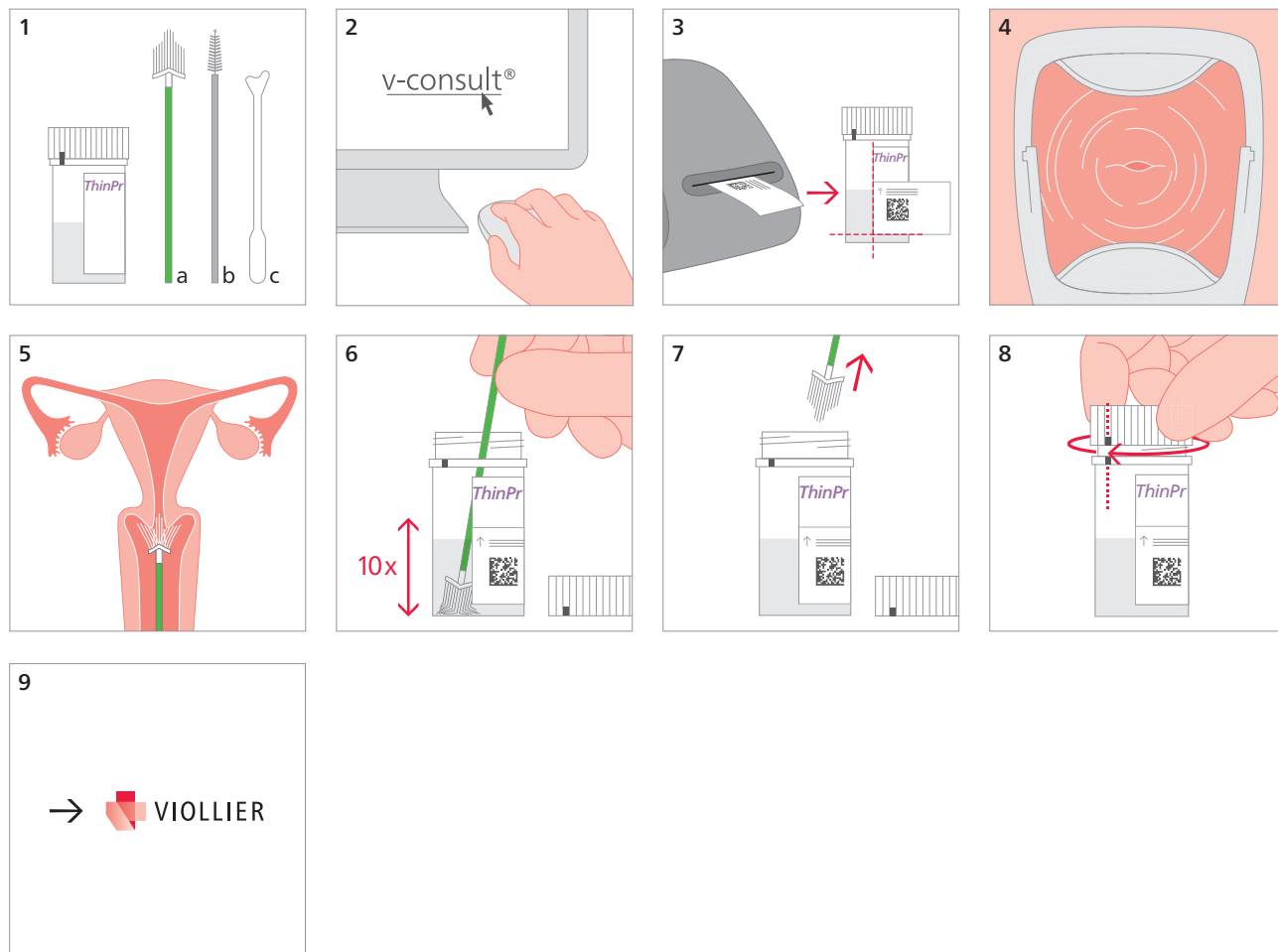

3 Incollare l'etichetta con codice a barra sull'etichetta esistente, allineata al bordo sinistro e inferiore

4 Centrare la portio vaginalis uteri. Rimuovere con delicatezza le placche di secrezione

5 Prelevare il campione:

a Con **Cervex-Brush®** oppure **Cervibrush® Plus**

Esercitare una lieve pressione in direzione della cervice finché le setole laterali sono premute contro l'esocervice

Sempre con una lieve pressione, girare 5 x in senso orario

b / c Con **Cytobrush® Plus GT / Spatola in plastica**

Inserire nel canale cervicale, finché sono visibili solo le setole della base

Ruotarlo lentamente di ¼ o ½ giro in un solo senso. Non ruotarlo eccessivamente

6 Lavare lo spazzolino nella soluzione PreservCyt. A questo scopo premere la testa dello spazzolino **10 x fortemente** contro il fondo del flacone, forzando per separare le setole

7 Gettare lo spazzolino. **Non lasciare la testa dello spazzolino immersa nel barattolo**

8 Avvitare il tappo a fondo, fino ad allineare il segno sul tappo e quello sul barattolo

I lubrificanti interferiscono con la preparazione dei campioni e rendono difficoltosa o impediscono la valutazione microscopica degli strisci. Rinunciare, nel limite del possibile, al loro utilizzo.

Il lubrificante raccomandato Gyn-Lys (Art.-Nr- 600560) è disponibile nel v-shop®.

Materiale di spedizione:

Indicare cognome, nome e data di nascita del paziente