


Test respiratoire au ^{13}C – Helicobacter pylori

Kit test respiratoire ^{13}C (56)

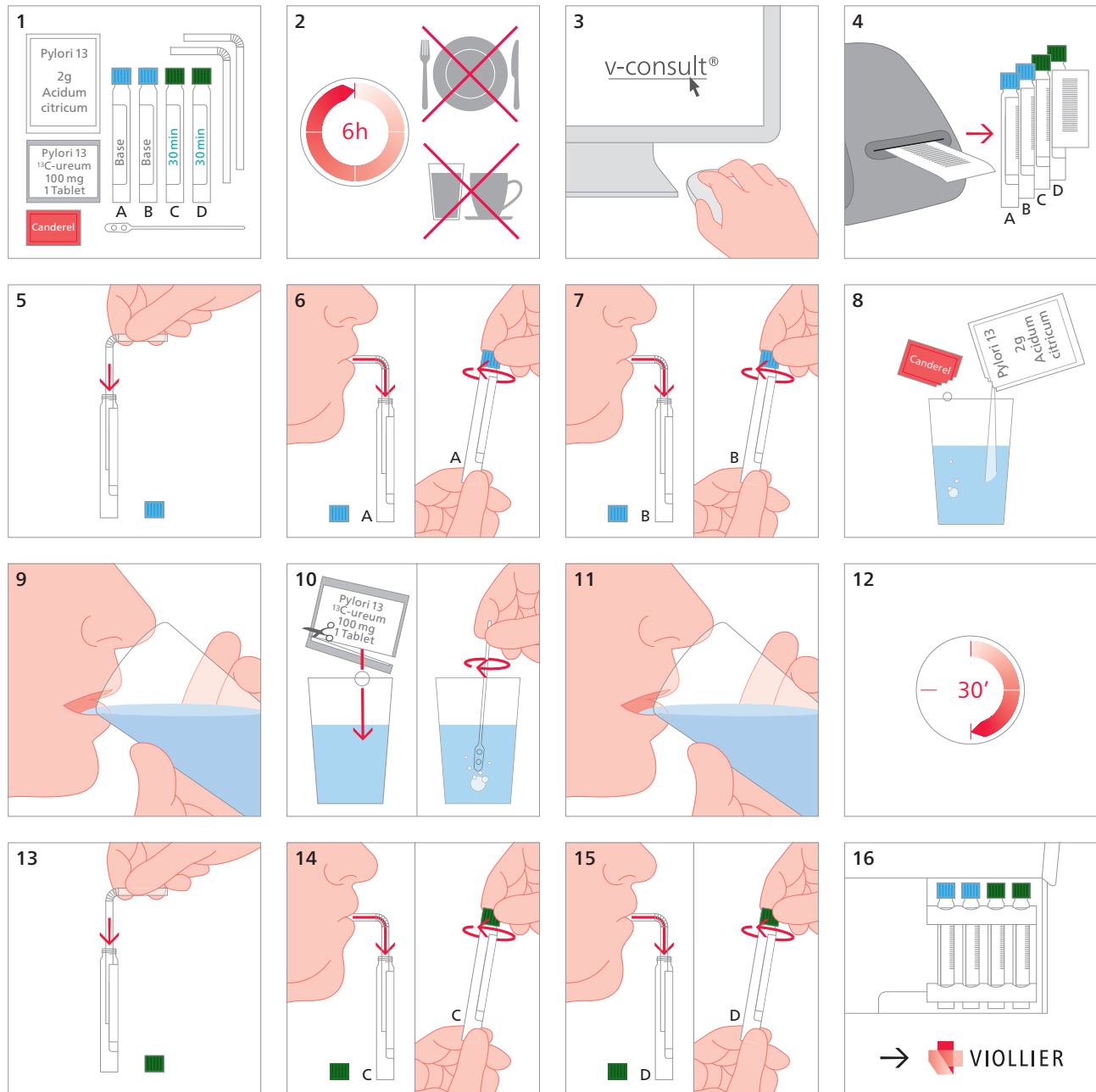

5 – 7 Inspirer profondément, expirer **tout l'air (air résiduel)** dans les tubes bleus en soufflant lentement dans la paille, fermer immédiatement

8 – 9 Dissoudre 2 g d'acide citrique (et les tablettes d'édulcorant si souhaité) dans 100 mL H₂O et boire **tout le contenu**

10 – 11 Dissoudre la tablette d'urée (Urea ^{13}C Tablet) dans 100 mL H₂O et boire **tout le contenu**

12 **Attendre 30 min**

13 – 15 Inspirer profondément, expirer **tout l'air (air résiduel)** dans les tubes verts en soufflant lentement dans la paille, fermer immédiatement

Matériel d'expédition :

Veuillez inscrire le nom, prénom et la date de naissance du patient