


## Biopsie – Pathologie

Tubes avec formaldéhyde 4 %, pH 7.4

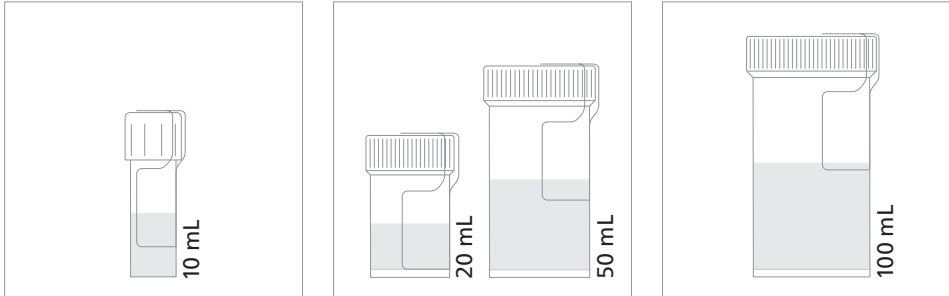


- Récipients plus grands sur demande
- Récipients sans formaldéhyde sur demande
- Ne pas utiliser pour la recherche de germes
- Ratio tissus et formaldéhyde :  $\geq 1:4$

Les pièces anatomiques chirurgicales non fixées, en particulier oncologiques, doivent être acheminées dans les plus brefs délais en pathologie afin de limiter le temps d'ischémie froide. Le temps d'ischémie froide affecte l'interprétation de certains paramètres biologiques.

**Veillez noter l'heure exacte du prélèvement.**

### Tube 'Milieu de Michel'

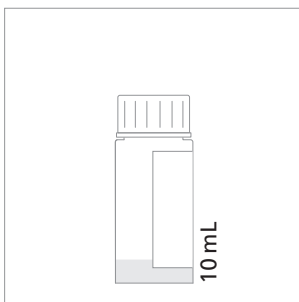

Pour les biopsies de peau non fixées

Matériel d'expédition :

Veillez inscrire le nom, prénom et la date de naissance du patient