


Prise de sang – Agglutinines froides

Tube sans additifs, rouge (2)

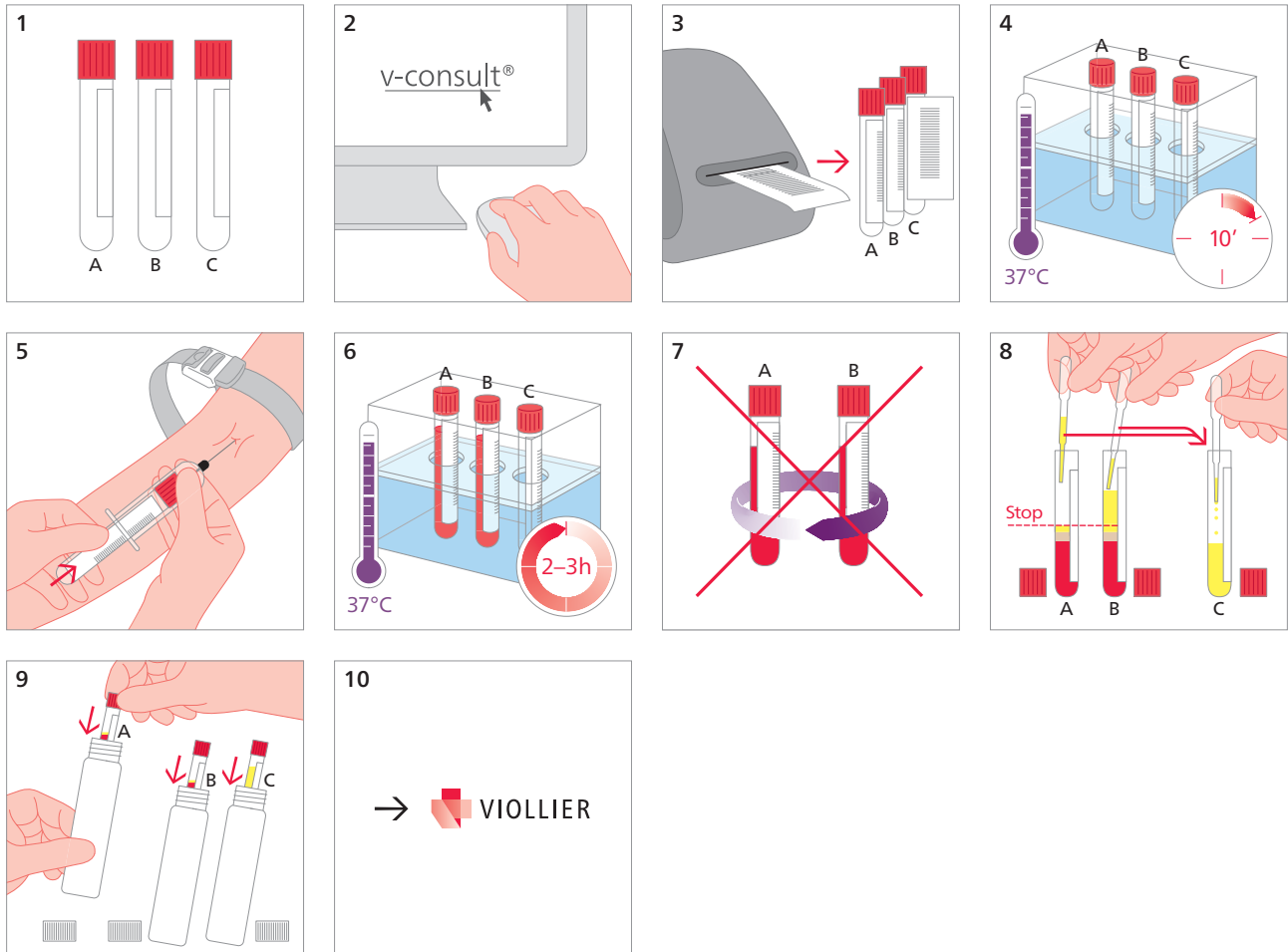

- Préchauffer le tube à 37°C durant 10 min
- Prélever le sang dans 2 tubes sans additifs, rouges
- Sédimentation à 37°C pendant 2 – 3h, **ne pas centrifuger**
- Transférer le sérum dans le 3^e tube sans additifs, rouge
 - Env. 4 mm d'intervalle de sécurité avec le sédiment
 - Pipetter avec précaution : les érythrocytes peuvent fausser le résultat de cette analyse
- Si ce mode de préanalytique ne peut être garanti au cabinet médical, la prise de sang chez Viollier peut être convenue après rendez-vous téléphonique
- Prises de sang : lundi – jeudi

Matériel d'expédition :

Veuillez inscrire le nom, prénom et la date de naissance du patient