


## Prelievo di sangue – Crioglobuline

Provetta senza aggiunta, rossa (2)

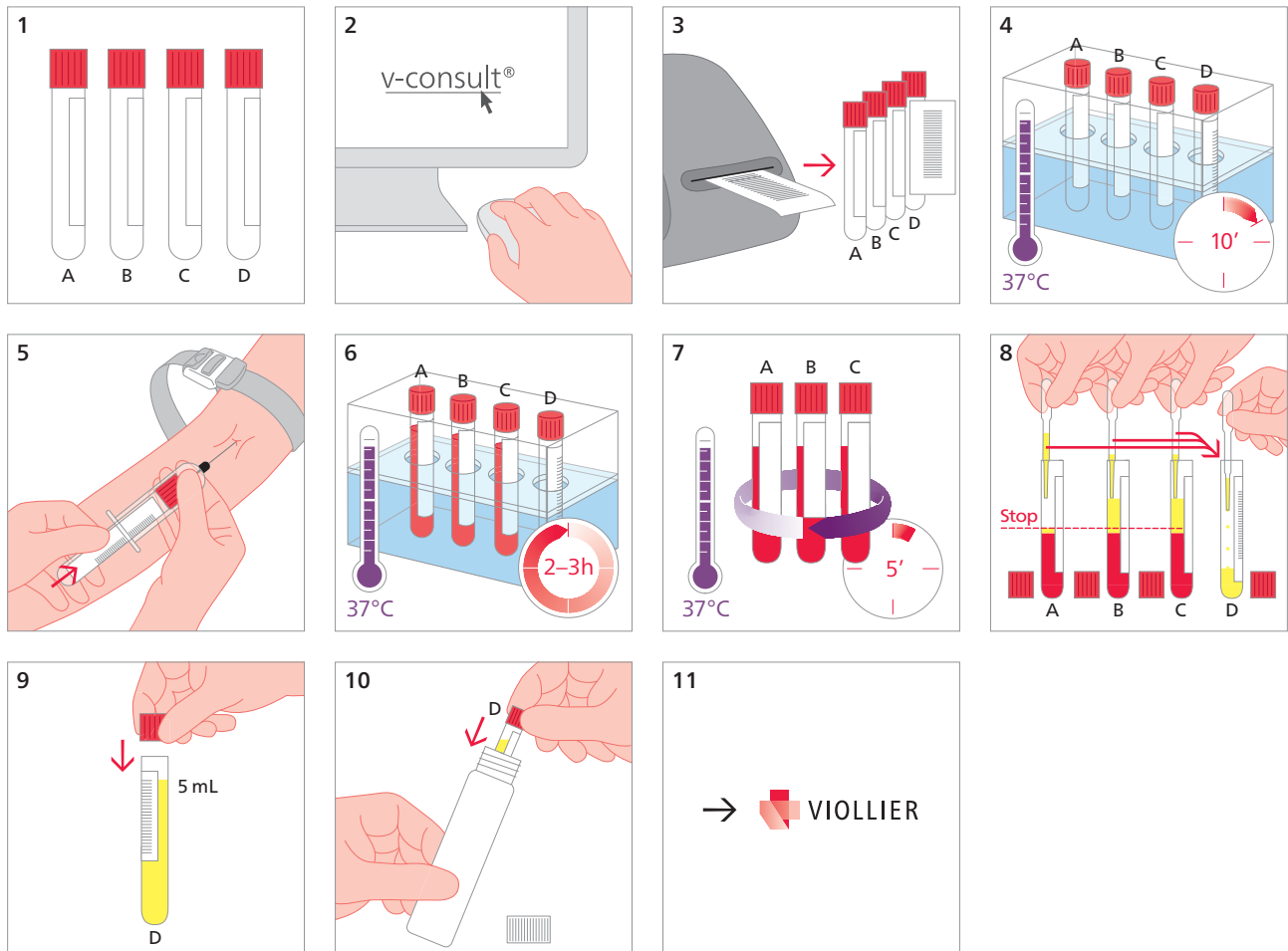

- Preriscaldare le provette durante 10 min a 37°C
- Prelievo di sangue in 3 provette senza aggiunta, rosse
- Incubare 2 – 3 ore a 37°C (si prega di confermare in v-consult®)
- Centrifugazione **necessariamente** a 37°C
- Gli eritrociti possono pregiudicare il risultato di quest'analisi
- Se questo tipo di preanalitica non può essere garantito nello studio medico, il prelievo può essere concordato telefonicamente con Viollier
- Giorni per il prelievo: lunedì – giovedì

Materiale di spedizione:

Indicare cognome, nome e data di nascita del paziente