



## Etichettatura del materiale di prelievo e di spedizione

### Assegnazione etichetta → provetta

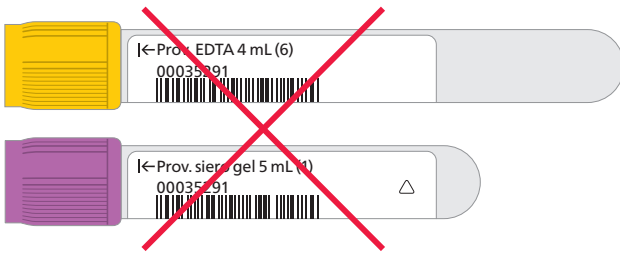

#### Errato

Assegnazione errata etichetta → provetta

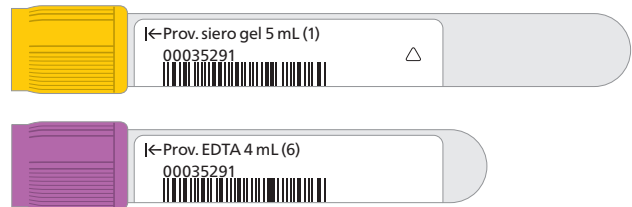

#### Correto

Etichetta siero → provetta siero  
Etichetta EDTA → provetta EDTA ecc.

### Direzione della freccia sulla provetta



#### Errato


La freccia indica nella direzione opposta al tappo



#### Correto

La freccia indica verso il tappo

### Posizionamento sulla provetta

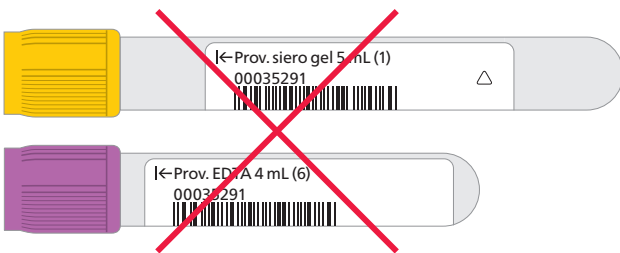

#### Errato

Distanza tra etichetta e tappo troppo grande



#### Correto


Etichetta vicino al tappo



### Allineamento sulla provetta




**Errato**  
Etichetta inclinata

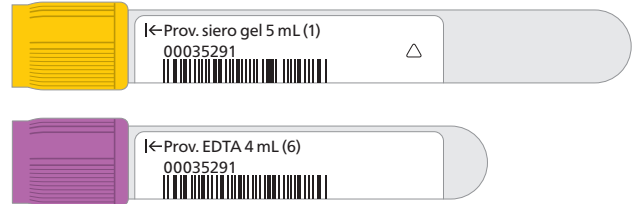


**Correto**  
Etichetta diritta

### ThinPrep® PAP Test

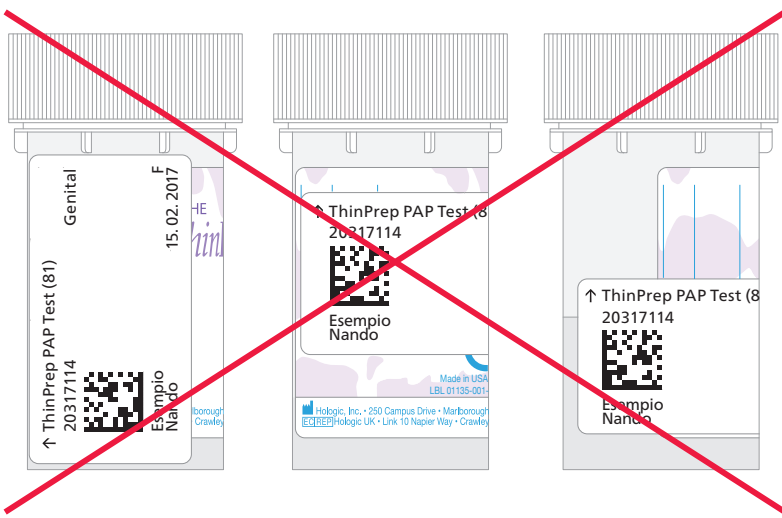

**Errato**  
Etichetta verticale  
Etichetta troppo alta  
Etichetta non del tutto su etichetta preesistente

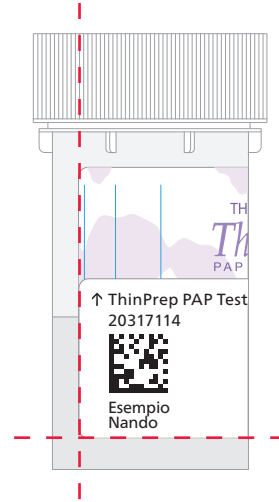

**Correto**  
Etichetta orizzontale, in basso a livello sull'etichetta preesistente