


## Emocoltura – Batteri e lieviti: Monovette®

Emocolture (36)

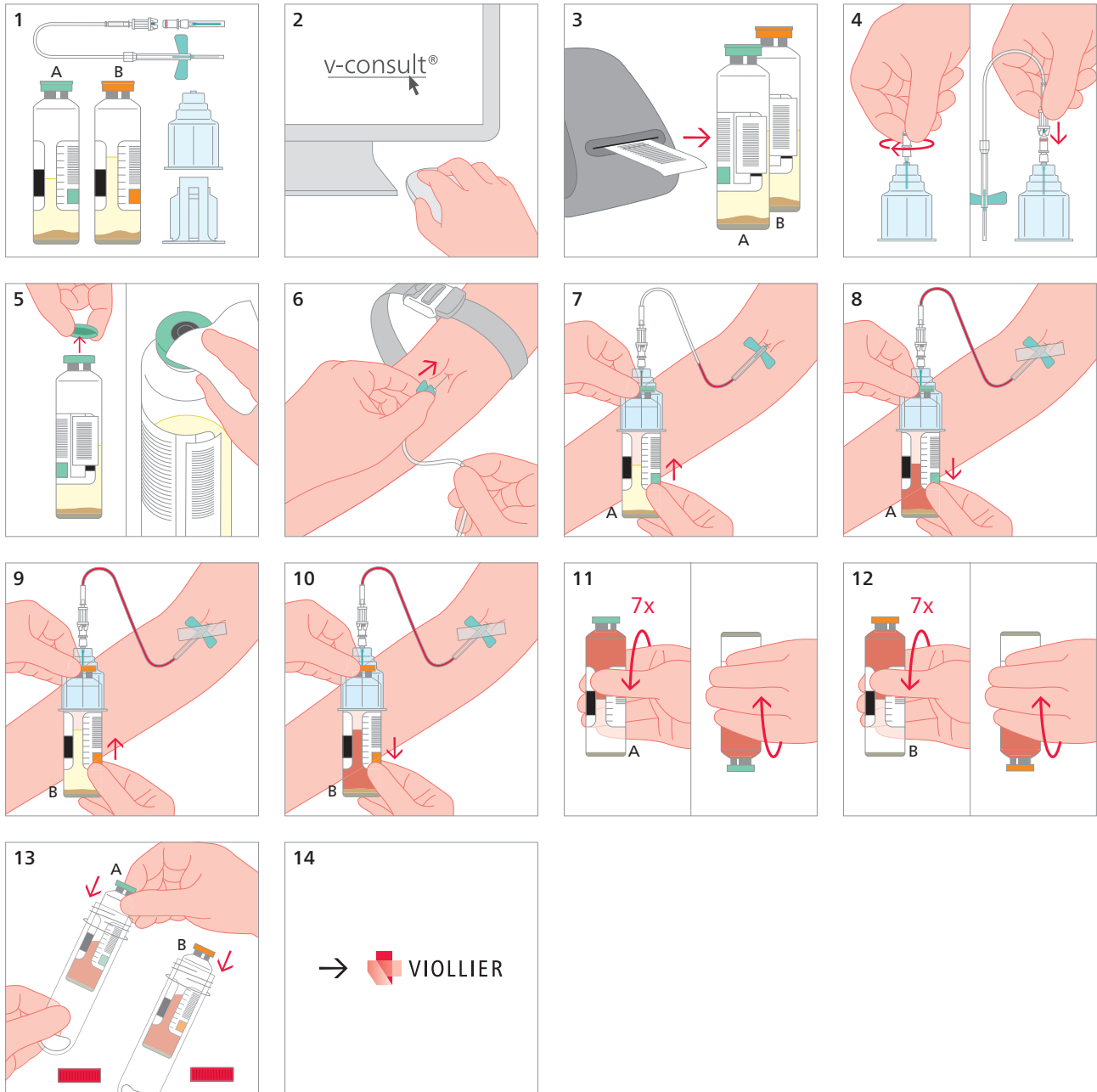

5 Prestare attenzione al tempo d'azione del disinfettante per la cute

7 – 10 5 – 10 mL per flacone (per i bambini è sufficiente un flacone per aerobi da 3 – 5 mL, per lattanti 1 – 2 mL **per prelievo**)  
2 – 3 coppie di emocolture (1 flacone per aerobi + 1 flacone per anaerobi)

- Prelievo all'innalzamento della febbre e prima della somministrazione di antibiotici
- Una punzione per ogni emocoltura (coppia di flaconi)  
In caso di catetere venoso centrale: prelevare 1 coppia mediante il catetere e 1 – 2 coppie mediante punzione
- **Non adatto per micobatteri** → provetta litio-eparina, senza gel (5G)

Materiale di spedizione:

Indicare cognome, nome e data di nascita del paziente