


Abstrich – Gynäkologische Zytologie: konventionelle Methode

Objektträger in Hülse, weiss (30), verschiedene Instrumente für Probenentnahme

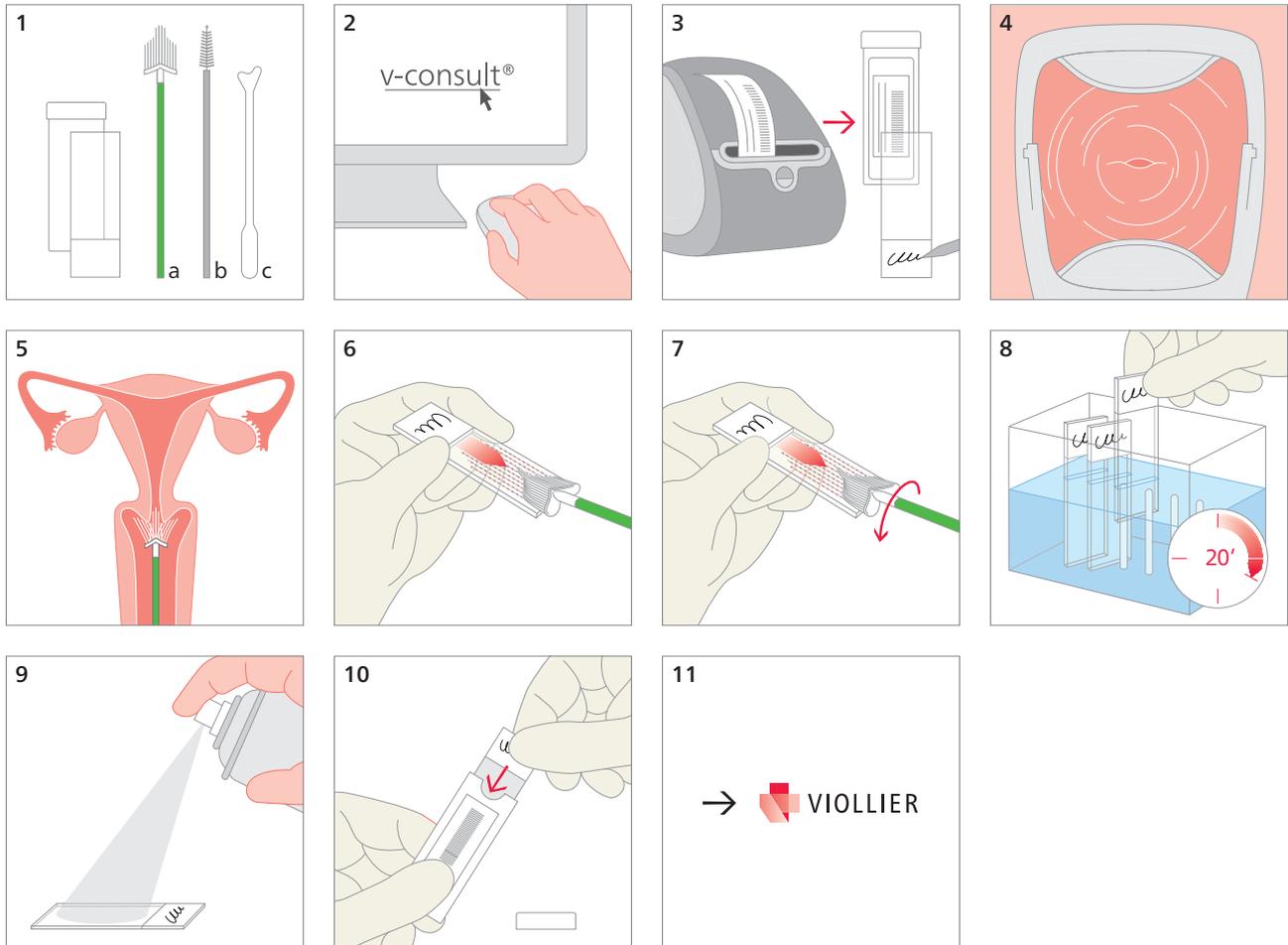

2 Angaben zur Patientin und ihrer Anamnese in v-consult® vermerken

4 Portio vaginalis uteri einstellen. Bedeckende Sekretionen schonend entfernen

5 Probenmaterial entnehmen:

a Mit **Cervex-Brush®** oder **Cervibrush® Plus**

Leichten Druck in Richtung auf die Zervix ausüben, bis die seitlichen Borsten gegen die Ektozervix gedrückt werden

Unter weiterhin leichtem Druck 5 x im Uhrzeigersinn drehen

b / c Mit **Cytobrush® Plus GT / Kunststoffspatel**

In Zervixkanal einführen, bis nur noch die hintersten Borsten zu sehen sind

Langsam eine ¼ oder ½ Drehung durchführen. Nicht überdrehen

6 – 7 Das Zellmaterial auf den Objektträger übertragen: erst die eine Seite der Bürste dann die andere Seite über den Objektträger streichen. Kreisförmige Bewegungen vermeiden

8 – 9 Sofort während mindestens 20 min in Isopropanol 99% fixieren oder mit dünn aufgetragenen Fixierspray fixieren

10 **Trockenes** Präparat in Hülse stecken

Versandmaterial:

Bitte mit Namen, Vornamen und Geburtsdatum des Patienten beschriften