


## Striscio – Citologia ginecologica: Metodo convenzionale

Portaoggetti con custodia, bianco (30), strumenti diversi per la raccolta dei campioni

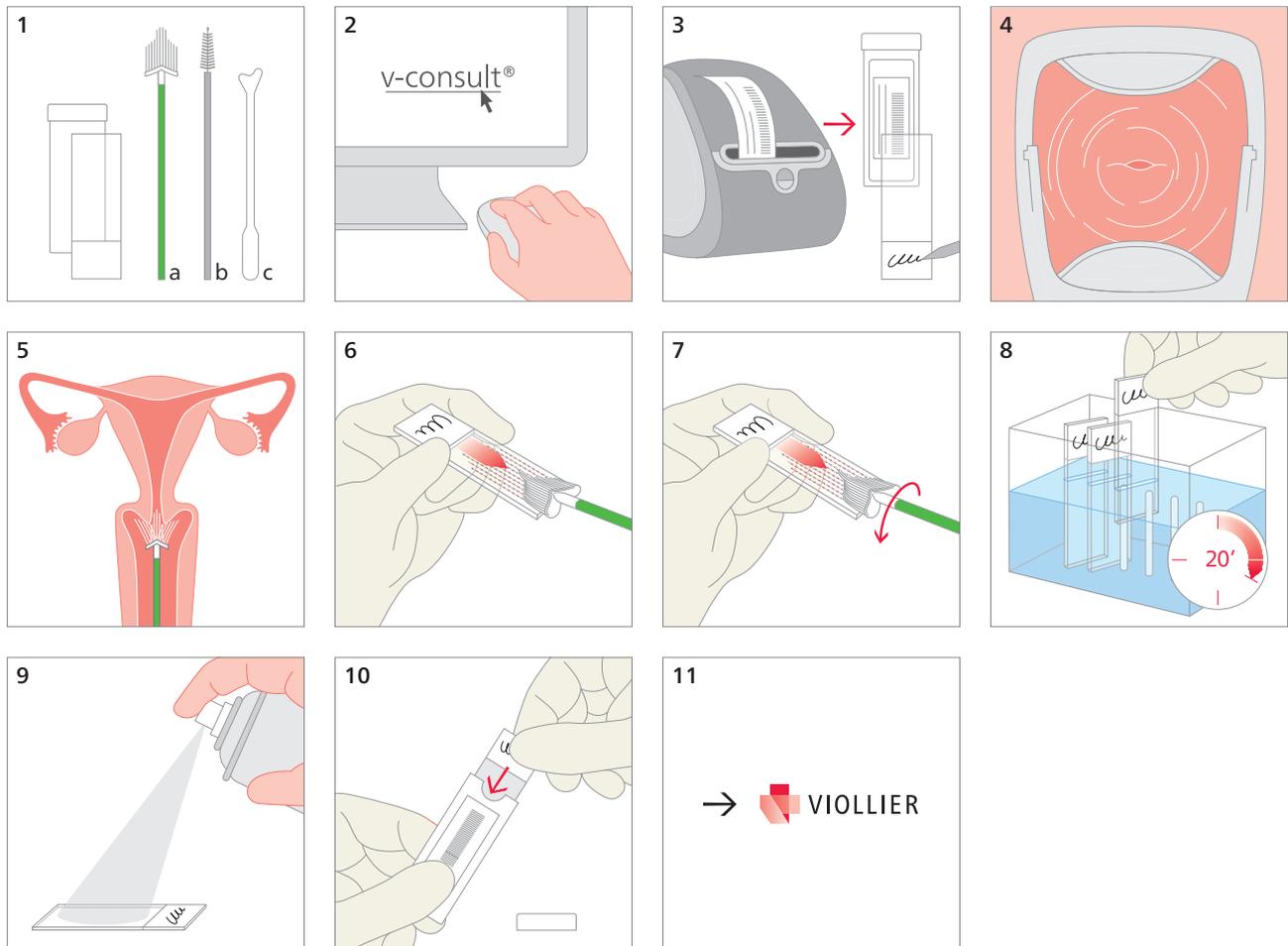

- 2 Riportare le informazioni riguardanti la paziente e la sua anamnesi in v-consult®

---

- 4 Centrare la portio vaginalis uteri. Rimuovere con delicatezza le placche di secrezione

---

- 5 Prelevare il campione:
  - a Con **Cervex-Brush®** oppure **Cervibrush® Plus**  
Esercitare una lieve pressione in direzione della cervice finché le setole laterali sono premute contro l'escervice  
Sempre con una lieve pressione, girare 5 x in senso orario
  - b / c Con **Cytobrush® Plus GT / Spatola in plastica**  
Inserire nel canale cervicale, finché sono visibili solo le setole della base  
Ruotarlo lentamente di ¼ o ½ giro in un solo senso. Non ruotarlo eccessivamente

---

- 6 – 7 Trasferire il materiale cellulare sul portaoggetti: spalmare prima un lato della spazzola poi l'altro sul portaoggetti. Evitare i movimenti circolari

---

- 8 – 9 Fissare subito per almeno 20 minuti in isopropanolo al 99% oppure fissare con un leggero spray di fissaggio

---

- 10 Inserire il preparato **asciutto** nella custodia

---

Materiale di spedizione:

Indicare cognome, nome e data di nascita del paziente