


## Abstrich – Wangenschleimhaut (Humangenetik)

### Abstrichset Wangenschleimhaut (71)

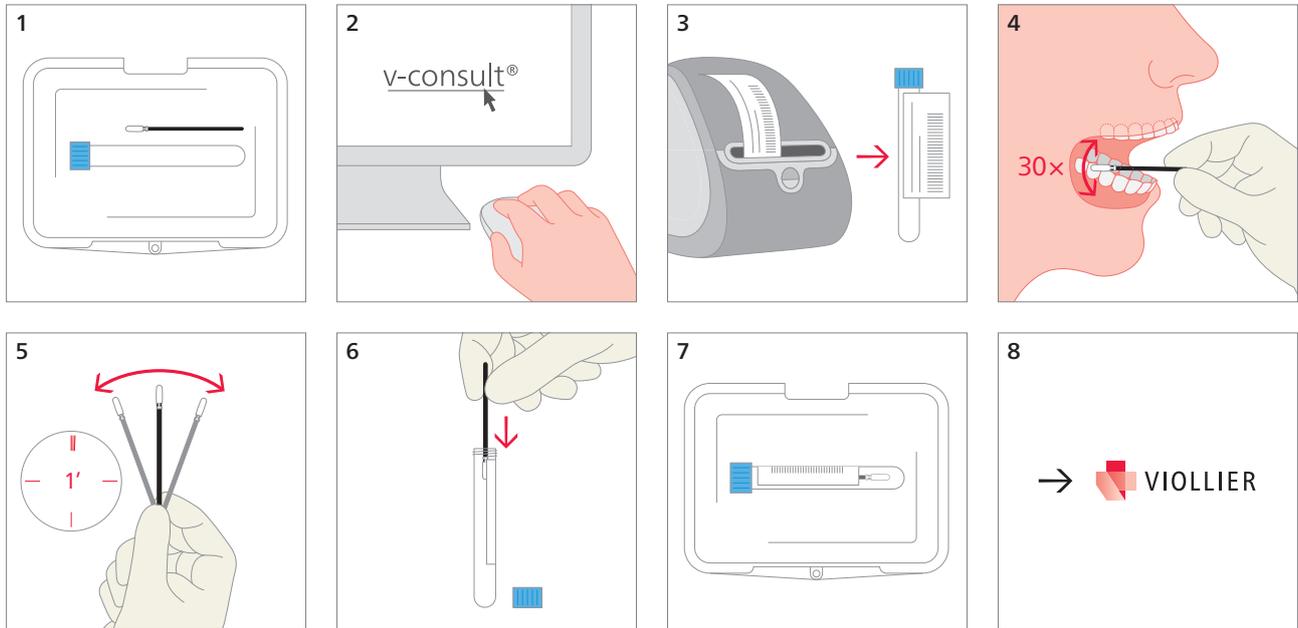

- 
- 4 Mindestens 30 x kräftig über die Wanginnenfläche streichen
- 
- 5 Tupfer 1 min in der Luft fächeln
- 
- 7 Probe vor Transport bei Raumtemperatur lagern
- 

Genetische Dispositionen, z. B. Laktoseintoleranz

Versandmaterial:

Bitte mit Namen, Vornamen und Geburtsdatum des Patienten beschriften