


## Test respiratorio con $^{13}\text{C}$ – Helicobacter pylori

Set test respiratorio  $^{13}\text{C}$  (56)

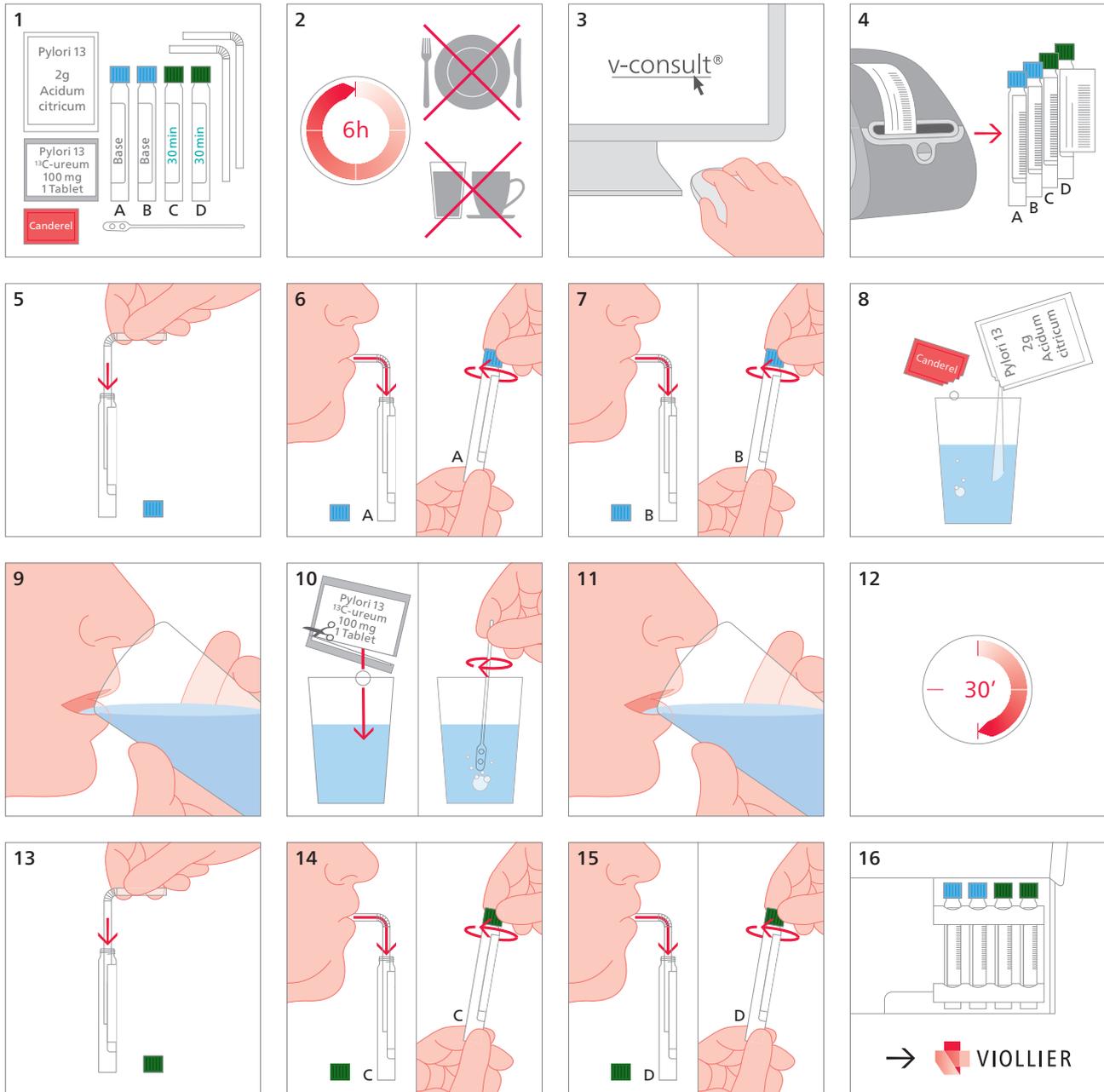

- 5 – 7 Inspirare profondamente, espirare lentamente e **completamente (aria residua)** nelle provette con tappo celeste (A e B) mediante la cannucina; chiudere immediatamente
- 8 – 9 Dissolvere 2 g di acido citrico (se desiderato anche le compresse di dolcificante) in 100 mL di H<sub>2</sub>O e bere **completamente**
- 10 – 11 Dissolvere la compressa di urea (urea  $^{13}\text{C}$  tablet) in 100 mL di H<sub>2</sub>O e bere **completamente**
- 12 **Attendere 30 min**
- 13 – 15 Inspirare profondamente, espirare lentamente e **completamente (aria residua)** nelle provette con tappo verde (C e D) mediante la cannucina; chiudere immediatamente

Materiale di spedizione:

Indicare cognome, nome e data di nascita del paziente