


Biopsie – Pathologie

Tubes mit Formaldehyd 4%, pH 7.4

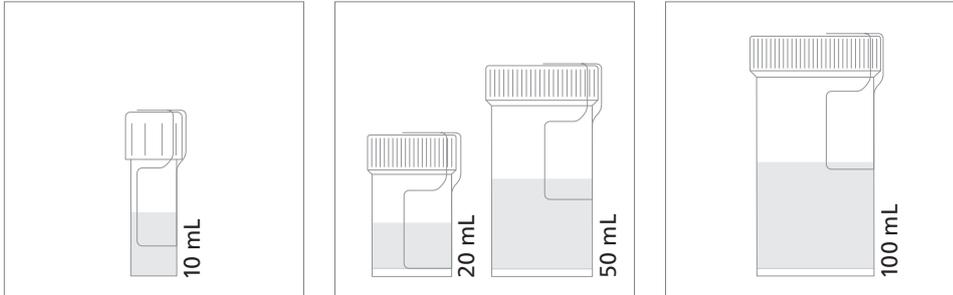


- Grössere Behälter auf Anfrage
- Behälter ohne Formaldehyd auf Anfrage
- Nicht geeignet für Erregernachweis
- Verhältnis Gewebe und Formaldehyd: $\geq 1:4$

Unfixierte Operationspräparate, insbesondere Tumorpräparate, müssen möglichst schnell in die Pathologie transportiert werden, um die kalte Ischämiezeit zu begrenzen. Die kalte Ischämiezeit beeinträchtigt die Beurteilbarkeit gewisser biologischer Parameter.

Bitte die genaue Entnahmezeit vermerken.

Tube 'Michel's Medium'

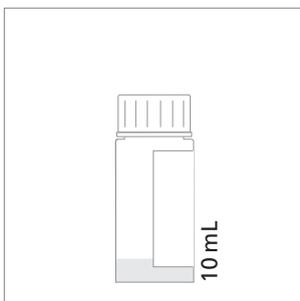

Für direkte Immunfluoreszenz

Versandmaterial:

Bitte mit Namen, Vornamen und Geburtsdatum des Patienten beschriften