


## Prelievo di sangue – Agglutinine a freddo

Provetta senza aggiunta, rossa (2)

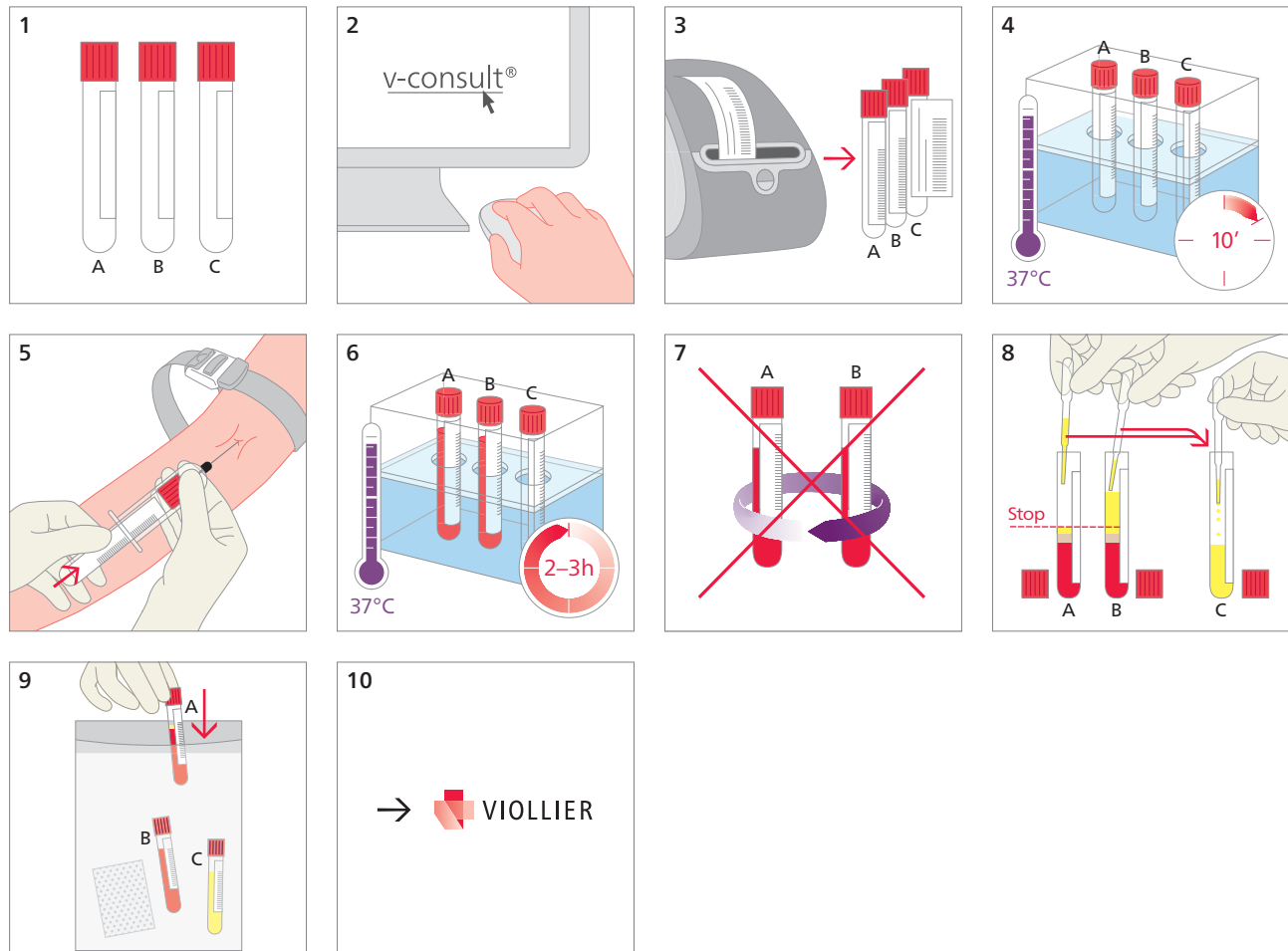

- Preriscaldare le provette durante 10 min a 37°C
- Prelievo di sangue in 2 provette senza aggiunta, rosse
- Sedimentazione per 2 – 3h a 37°C, **non centrifugare**
- Trasferire il siero in una terza provetta senza aggiunta, rossa
  - Mantenere una distanza di ca. 4 mm dal sedimento
  - Pipettare con cautela: gli eritrociti possono pregiudicare il risultato di quest'analisi
- Se questo tipo di preanalitica non può essere garantito nello studio medico, il prelievo può essere concordato telefonicamente con Viollier
- Giorni per il prelievo: lunedì – giovedì

Materiale di spedizione:

Indicare cognome, nome e data di nascita del paziente