


## Blutentnahme – Kryoglobuline

Tube ohne Zusatz, rot (2)

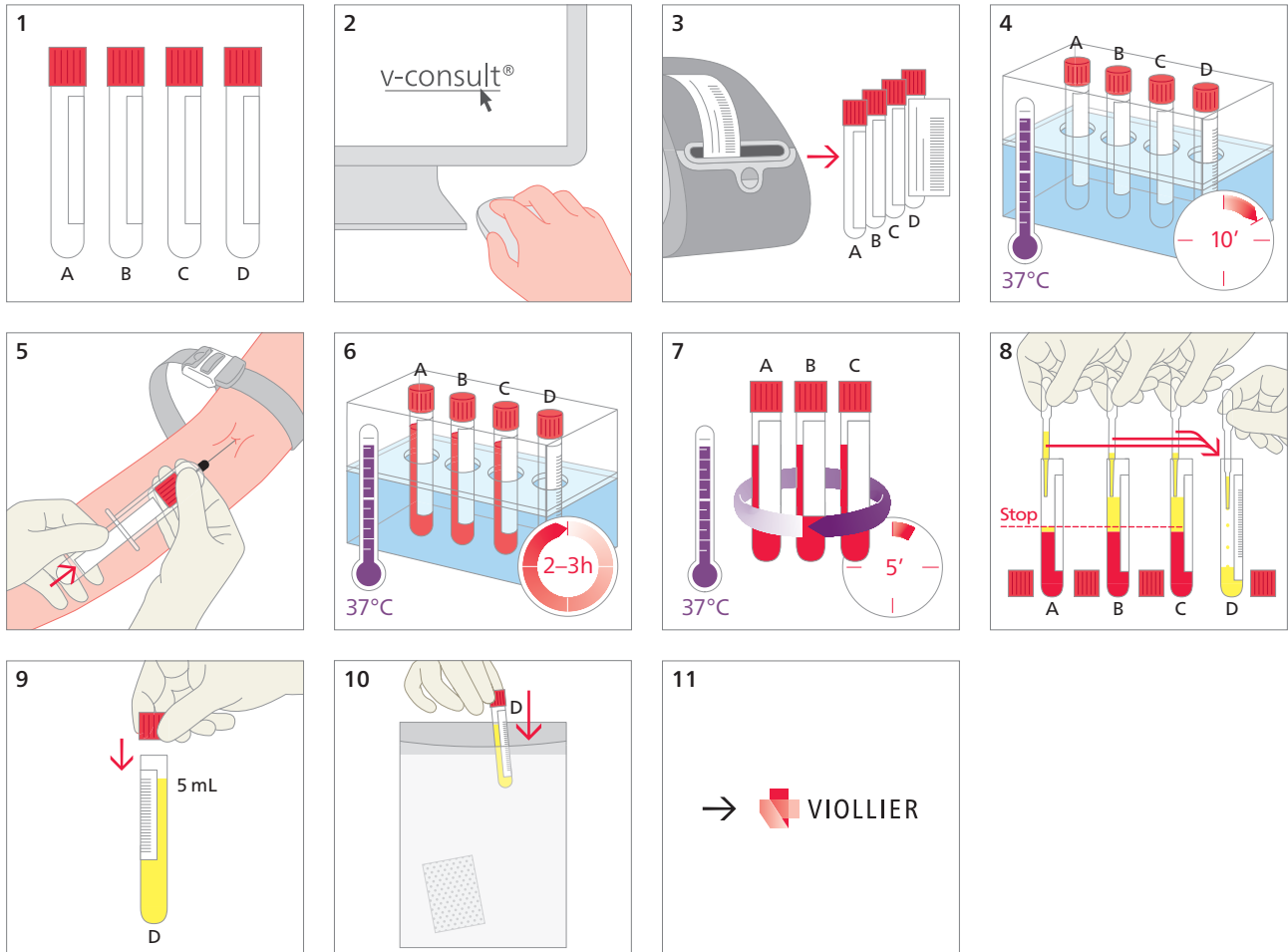

- Tubes 10 min bei 37°C vorwärmen
- Blutentnahme in 3 Tubes ohne Zusatz, rot
- Inkubation 2 – 3h bei 37°C (bitte in v-consult® bestätigen)
- Zentrifugation **unbedingt** bei 37°C
- Erythrozyten können das Resultat dieser Analyse verfälschen
- Falls diese Art der Präanalytik in der Praxis nicht garantiert ist, kann telefonisch die Blutentnahme bei Viollier vereinbart werden
- Blutentnahmezeiten: Montag – Donnerstag

Versandmaterial:

Bitte mit Namen, Vornamen und Geburtsdatum des Patienten beschriften