


Prise de sang – Cryoglobulines

Tube sans additifs, rouge (2)

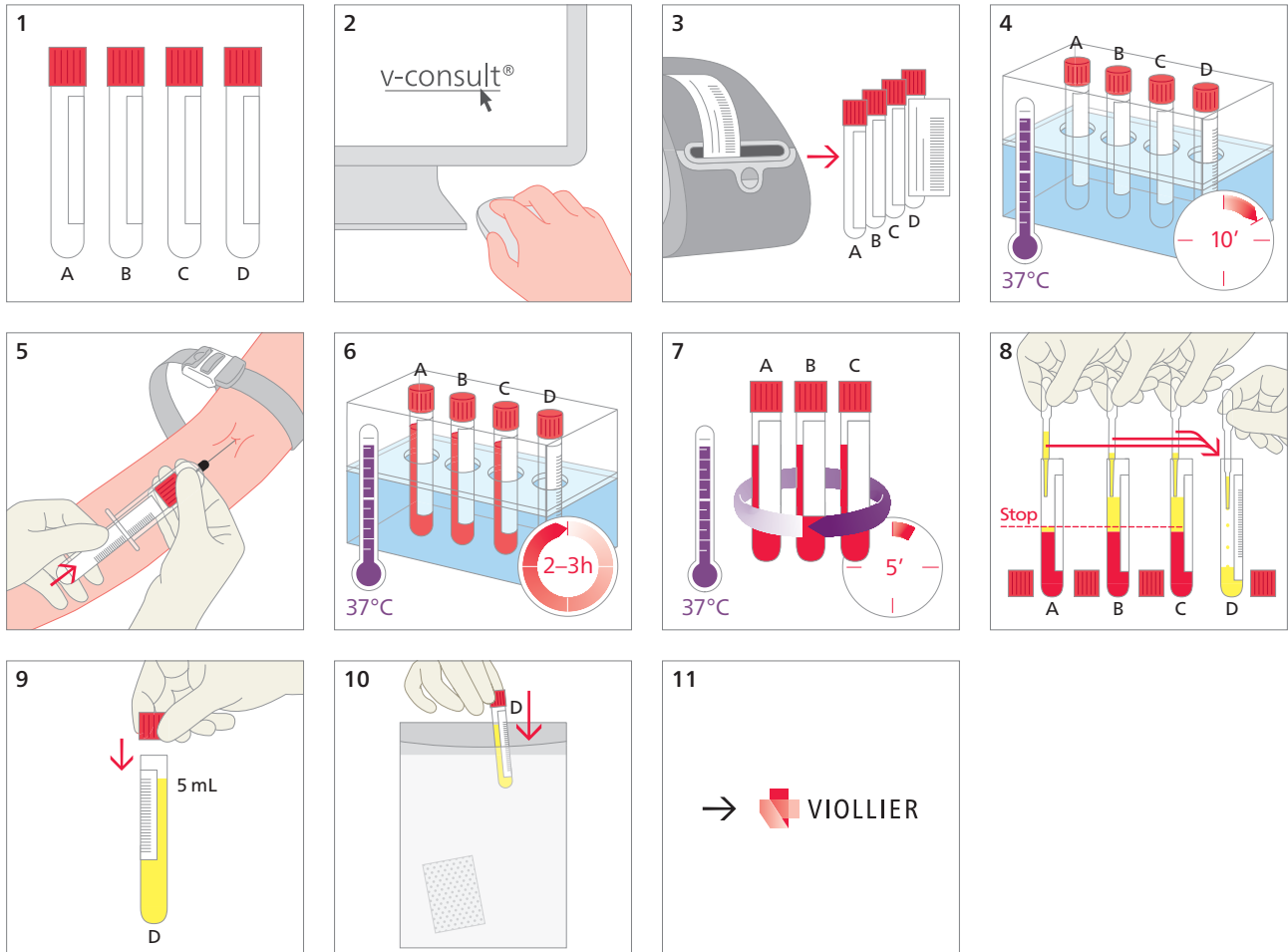

- Préchauffer le tube à 37°C durant 10 min
- Prélever le sang dans 3 tubes sans additifs, rouges
- Incubation durant 2 – 3 h à 37°C (à spécifier dans v-consult®)
- Centrifugation **indispensable** à 37°C
- Les érythrocytes peuvent fausser le résultat de cette analyse
- Si ce mode de préanalytique ne peut être garanti au cabinet médical, la prise de sang chez Viollier peut être convenue après rendez-vous téléphonique
- Prises de sang : lundi – jeudi

Matériel d'expédition :

Veuillez inscrire le nom, prénom et la date de naissance du patient