

Etichettatura del materiale di prelievo e di spedizione

Assegnazione etichetta → provetta



Errato

Assegnazione errata etichetta → provetta



Correto

Etichetta siero → provetta siero
Etichetta EDTA → provetta EDTA ecc.

Direzione della freccia sulla provetta



Errato


La freccia indica nella direzione opposta al tappo



Correto


La freccia indica verso il tappo

Posizionamento sulla provetta

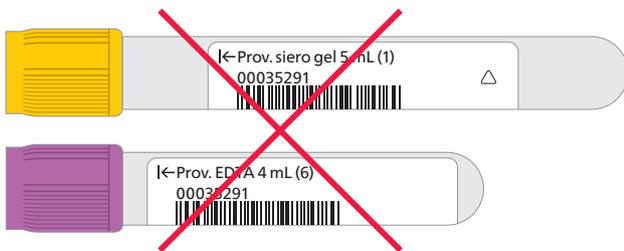

Errato

Distanza tra etichetta e tappo troppo grande

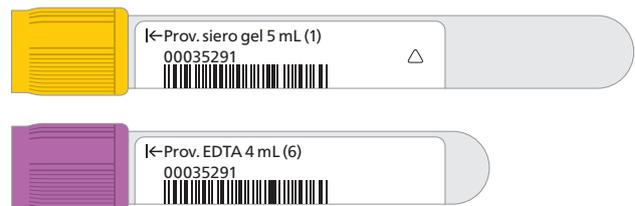

Correto

Etichetta vicino al tappo

Allineamento sulla provetta




Errato
Etichetta inclinata




Correto
Etichetta diritta

ThinPrep® PAP Test

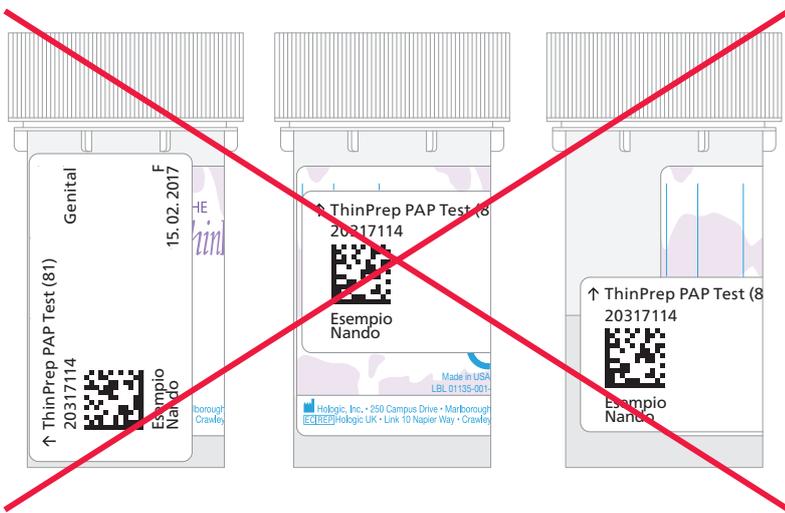

Errato
Etichetta verticale
Etichetta troppo alta
Etichetta non del tutto su etichetta preesistente

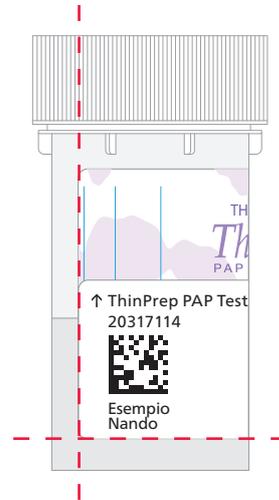

Correto
Etichetta orizzontale, in basso a livello sull'etichetta preesistente