


Striscio – Citologia ginecologica: Metodo convenzionale

Portaoggetti con custodia, bianco (30), strumenti diversi per la raccolta dei campioni

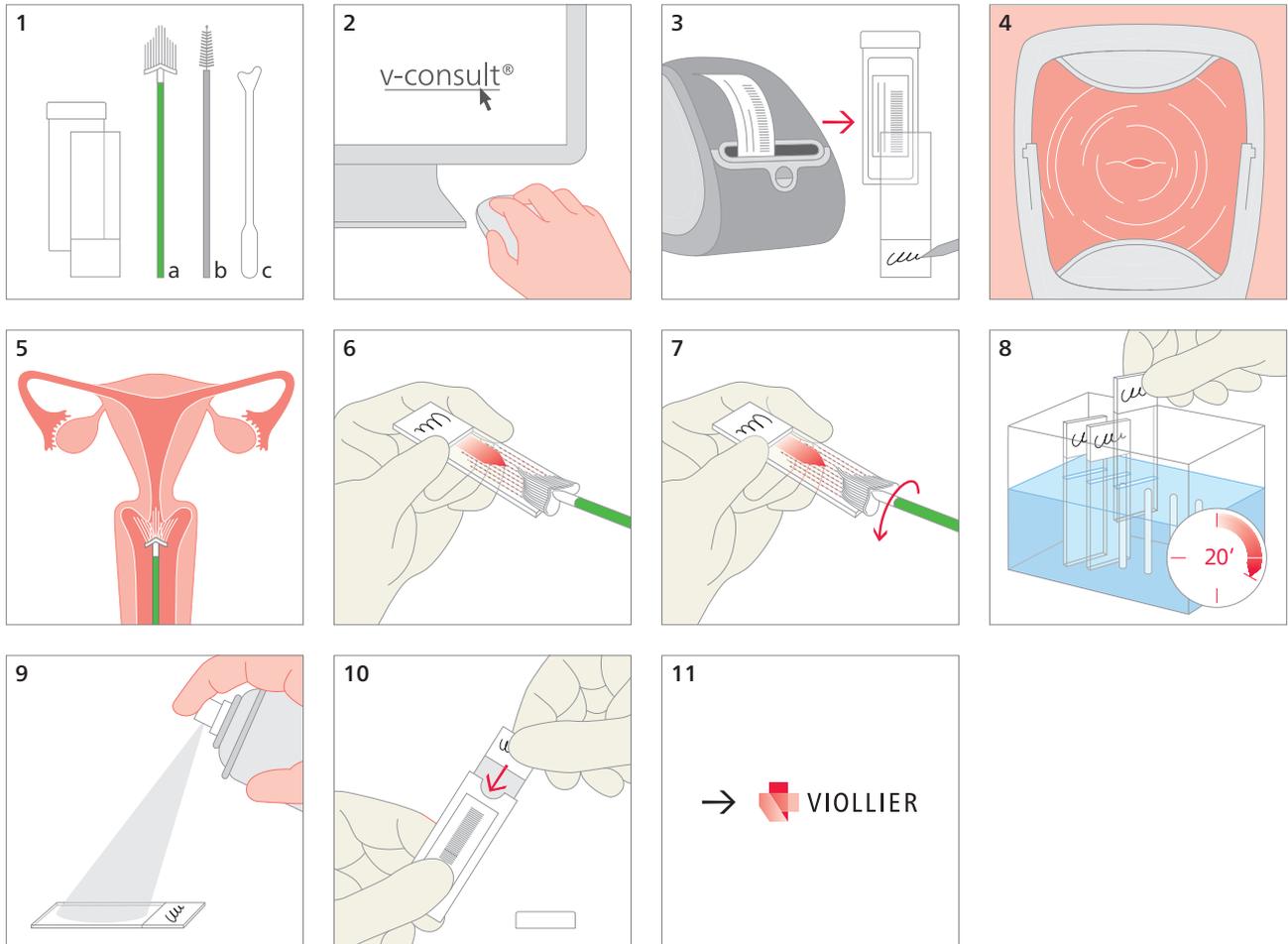

- | | |
|-------|--|
| 2 | Riportare le informazioni riguardanti la paziente e la sua anamnesi in v-consult® |
| 4 | Centrare la portio vaginalis uteri. Rimuovere con delicatezza le placche di secrezione |
| 5 | Prelevare il campione: <ul style="list-style-type: none"> a Con Cervex-Brush® oppure Cervibrush® Plus
Esercitare una lieve pressione in direzione della cervice finché le setole laterali sono premute contro l'escervice
Sempre con una lieve pressione, girare 5 x in senso orario b / c Con Cytobrush® Plus GT / Spatola in plastica
Inserire nel canale cervicale, finché sono visibili solo le setole della base
Ruotarlo lentamente di ¼ o ½ giro in un solo senso. Non ruotarlo eccessivamente |
| 6 – 7 | Trasferire il materiale cellulare sul portaoggetti: spalmare prima un lato della spazzola poi l'altro sul portaoggetti. Evitare i movimenti circolari |
| 8 – 9 | Fissare subito per almeno 20 minuti in isopropanolo al 99% oppure fissare con un leggero spray di fissaggio |
| 10 | Inserire il preparato asciutto nella custodia |

Materiale di spedizione:

Indicare cognome, nome e data di nascita del paziente