


Urine – Analyses chimiques : collecte d'urines de 24h avec conservateur

Flacon avec conservateur (50), tube spoturine avec acide chlorhydrique (HCl) (53)

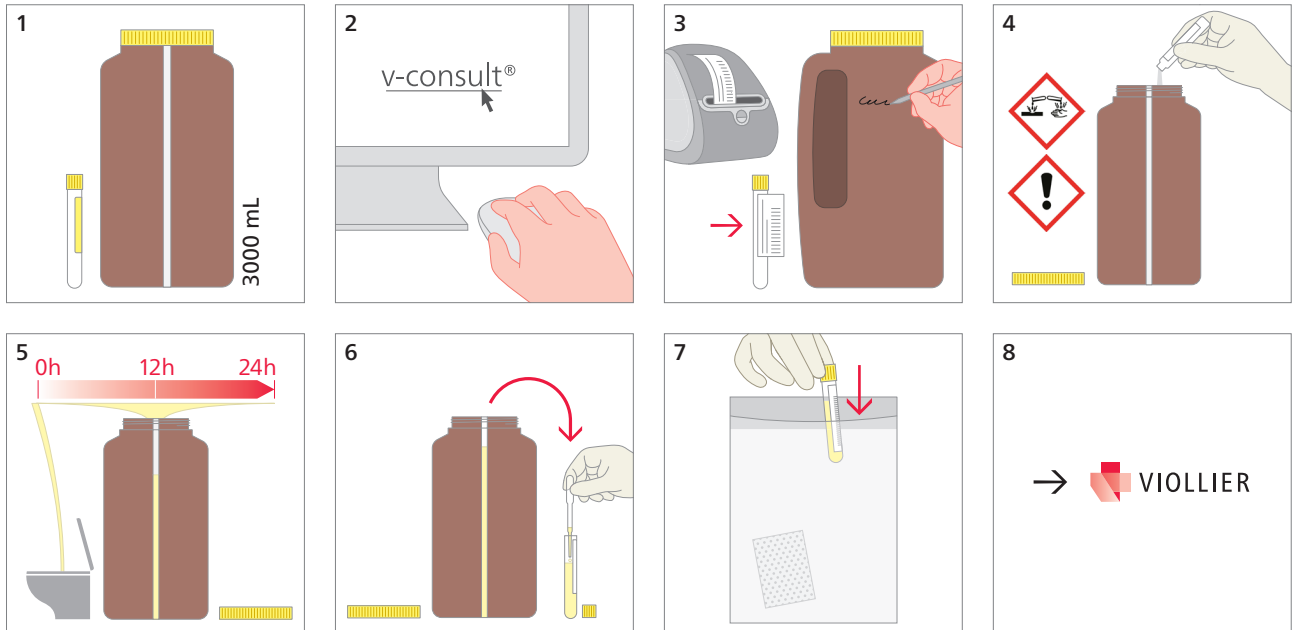

- 4** Pour l'urine avec acide chlorhydrique : ajouter de l'acide chlorhydrique (10 %) dans le flacon **avant** le début de la collecte
 Attention : l'acide chlorhydrique est corrosif et peut provoquer de graves irritations de la peau et des yeux !
 Ne pas mettre en contact avec les muqueuses et tenir hors de portée des enfants
 → Tox Info Suisse Numéro d'urgence 145 en cas de contact / brûlure chimique avec de l'acide chlorhydrique
 - 5** Début du recueil des urines : jeter les 1^{res} urines du matin et recueillir la totalité des urines suivantes jusqu'au lendemain matin, 1^{res} urines du matin incluses
 Conserver le flacon de collecte dans un endroit frais et à l'abri de la lumière pendant toute la période de collecte
 Noter la durée et le volume de la collecte et communiquer ces informations au médecin. Le médecin saisit les données dans v-consult®
 - 6** Mélanger l'urine, remplir entièrement au moins 1 tube spoturine
 → Volume minimal pour l'analyse selon v-consult®
- Veuillez éliminer le récipient de collecte avec son contenu dans le cabinet médical

Matériel d'expédition :

Veuillez inscrire le nom, prénom et la date de naissance du patient