

Zytologie – Extragenital

Probenart	Entnahme- und Versandmaterial	Konservierung	Maximale Transportdauer
Sputum	Tube, weiss, 40 mL (67)	Ohne Zusatz	24h
Bronchialsekret	Tube, weiss, 40 mL (67)	Ohne Zusatz	24h bei +4°C
Mamillensekret	Abklatsch auf Objektträger, Sofortfixation und einsenden in Hülse, weiss (30)	Cytostat-Spray (Art.-Nr. 2028)	Unkritisch
Broncho-alveoläre Lavage	Tube, weiss, 40 mL (67) in Eiswasser und Dewar Transportgefäss	Ohne Zusatz	Verarbeitung am selben Tag Telefonische Voranmeldung zur Organisation des Transports bei Customer Service Center nötig
Bürste in 0.9% NaCl (z. B. Bronchus, Zunge, Magen-Darm-Trakt)	Bürste in 0.9% NaCl auswaschen, abschneiden und einsenden in Steril-Tube, rot, 15 mL (29)	0.9% NaCl	24h
Bürste Direktausstrich (z. B. Bronchus, Zunge, Magen-Darm-Trakt)	Bürste auf Objektträger ausstreichen, Sofortfixation und einsenden in Hülse, weiss (30)	Cytostat-Spray (Art.-Nr. 2028)	Unkritisch
Bürste in PreservCyt® Solution (Anus, Mamille, Urethra, oral, nasal)	Cytobrush Plus GT oder PAP Perfekt Kunststoffspatel (Art.-Nr. 16653) in Tube, ThinPrep® PAP Test™ 20 mL (81) gut ausspülen, beim Cytobrush Borsten gegen die Tubewand drücken. Cytobrush und Spatel dürfen nicht im Tube verbleiben.	PreservCyt	Unkritisch
CytoLyt Solution	Tube, ThinPrep®, Cytolyt Solution, 30 mL	PreservCyt	Unkritisch
Spontanurin (kein erster Morgenurin)	Gesamten Spontanurin einsenden in Urinbecher mit Schraubdeckel, weiss	Ohne Zusatz	24h über Nacht / Wochenende bei +4°C im Kühlschrank aufbewahren
Harnblasen-Spülflüssigkeit	Urinbecher mit Schraubdeckel, weiss	Ohne Zusatz	24h
Ergussflüssigkeit (z. B. Pleura, Aszites, Douglas, Perikard)	Gesamtes Punktat einsenden in Histobehälter, 3 L oder 6 L	Ohne Zusatz	24 – 48h über Nacht / Wochenende bei +4°C im Kühlschrank aufbewahren
Feinnadelaspirat (Lunge, EBUS, Lymphknoten)	Nadel- / Spritzeninhalt in 0.9% NaCl auswaschen in Steril-Tube, rot, 15 mL (29)	0.9% NaCl	24h
Feinnadelaspirat (Raumforderung, Organ, Gelenk)	Nadel- / Spritzeninhalt in 0.9% NaCl auswaschen in Steril-Tube, rot, 15 mL (29)	0.9% NaCl	24h
Feinnadelaspirat Direktausstrich (Raumforderung, Organ, Gelenk)	Nadel- / Spritzeninhalt auf Objektträger ausstreichen, Sofortfixation und je nach Anzahl der Objektträger einsenden in: Hülse, weiss (30), 1 Objektträger Versandtasche für 3 Objektträger Versandtasche für 6 Objektträger Versandtasche für 10 Objektträger Restmaterial in 0.9% NaCl auswaschen in Steril-Tube, rot, 15 mL (29)	Cytostat-Spray (Art.-Nr. 2028) 0.9% NaCl	Unkritisch
Liquor	20 – 40 Tropfen (1 – 2 mL) in Steril-Tube, rot, 15 mL (29)	Ohne Zusatz	2h