


Atemtest H₂ / CH₄

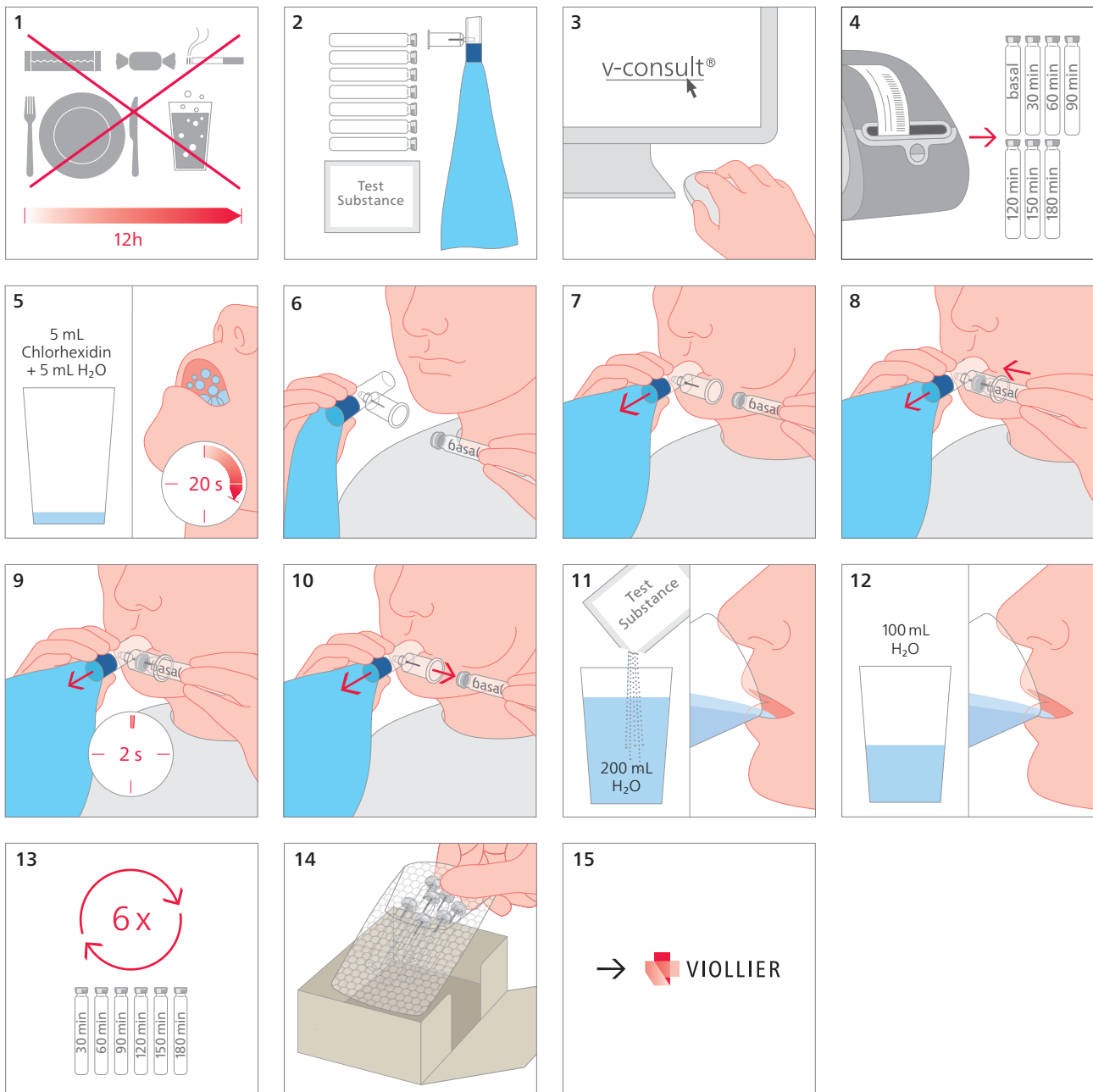

- 5 Vor der ersten Atemprobe Mund 20 s mit einer Mischung aus 5 mL Chlorhexidin Lösung 0.2% (z. B. Dentohexin®) und 5 mL Wasser spülen
- 6 – 7 1 × normal durch die Nase einatmen, Mundstück fest mit den Lippen umschliessen und gleichmässig ausatmen. Der blaue Atembeutel füllt sich mit Luft
- 8 – 10 Während des Ausatmens Basal-Tube in die Nadel des Adapters stechen und für weitere 2 s blasen. Tube abziehen → Ausatmung nicht unterbrechen, bis das Tube abgezogen ist
- 11 – 13 Nach Einnahme der in 200 mL Wasser aufgelösten Testsubstanz und dem Nachtrinken von 100 mL Wasser den Vorgang (Abb. 6 – 10) 6 × im zeitlichen Abstand von 30, 60, 90, 120, 150, 180 min durchführen

→ Testdauer ca. 4h

→ Bei ≤ 40 kg Körpergewicht den blauen Atembeutel entsprechend aufgedruckter Skala anpassen.
Bis zur entsprechenden Skala einrollen und mit Tacker / Bostitch® zusammen heften

→ Weitere Informationen → viollier.ch/H2_CH4_Info