


## Urine – Analyses chimiques : collecte d'urines de 24h sans conservateurs

Flacon sans conservateur (50), Tube spoturine sans conservateur (52)

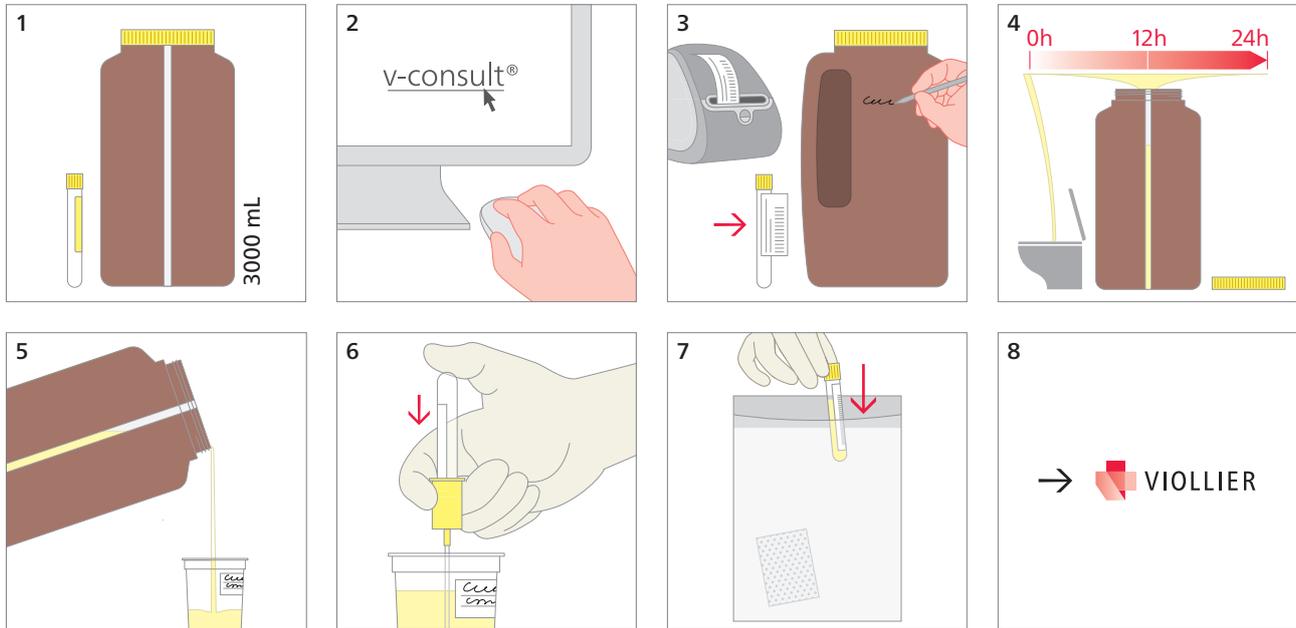

**4** Début du recueil des urines : jeter les 1<sup>res</sup> urines du matin et recueillir la totalité des urines suivantes jusqu'au lendemain matin, 1<sup>res</sup> urines du matin incluses  
Conserver le flacon de collecte dans un endroit frais et à l'abri de la lumière pendant toute la période de la collecte  
Noter la durée et le volume de la collecte et communiquer ces informations au médecin. Le médecin saisit les données dans v-consult®

**5** Mélanger l'urine et la verser dans le pot à urine

**6** Remplir entièrement au moins 1 tube spoturine → Volume minimal pour les analyses selon v-consult®

→ Veuillez éliminer le récipient de collecte avec son contenu dans le cabinet médical

Matériel d'expédition :

Veuillez inscrire le nom, prénom et la date de naissance du patient